

Ganz ehrlich:

*SpeediCath® Compact Eve
sieht toll aus, aber das ist
nicht der wichtigste Grund
für mich, ihn zu nutzen.*

Eva, ISK-Anwenderin



SpeediCath® Compact Eve
designed for you



SpeediCath® Compact Eve – unser diskretester Katheter

Es ist kein Geheimnis: Frauen sind anspruchsvoll bei den Produkten, die sie benutzen. Nicht nur Funktionalität ist wichtig, auch Verpackung und Design müssen stimmen. Daher haben wir uns bei der Entwicklung des Katheters SpeediCath® Compact Eve auf besondere Weise den Bedürfnissen von Frauen gewidmet.

80% *der Anwenderinnen sind der Meinung, dass sich SpeediCath® Compact Eve leicht in Ihren Alltag integrieren lässt.¹*

Mit unserem diskreten SpeediCath® Compact Eve Einmalkatheter möchten wir Ihren Alltag erleichtern und eine einfache sowie sichere Anwendung gewährleisten.

Vier entscheidende Vorteile für eine einfache und sichere Selbstkatheterisierung



Sofort gebrauchsfertig

SpeediCath® Compact Eve lässt sich in nur einem Schritt, mit einem Dreh, öffnen und ist sofort einsatzbereit.



Sicher anzuwenden

Die dreieckige Form sorgt für einen sicheren Griff und erleichtert ein hygienisches Katheterisieren – auch unterwegs.



Weniger Reibung

Die gleichmäßige hydrophile Beschichtung minimiert die Reibung beim Ein- und auch beim Herausführen.



Wiederverschließbar

Das tropfsichere Wiederverschließen ermöglicht einen diskreten, trockenen Transport und eine ortsunabhängige Entsorgung.


Ganz ehrlich:

*Ich will frei leben und
mir keine Gedanken über
komplizierte Katheter
machen müssen.*

Tabitha, ISK-Anwenderin




Die Anwendung von SpeediCath® Compact Eve

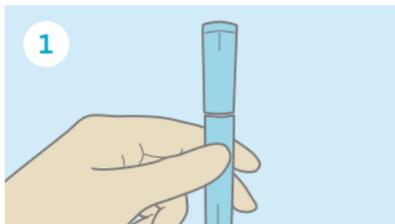


Halten Sie den Katheter aufrecht, sodass der Griff nach oben zeigt.




Öffnen Sie das Produkt, indem Sie Griff und Röhrchen in entgegengesetzte Richtung drehen.

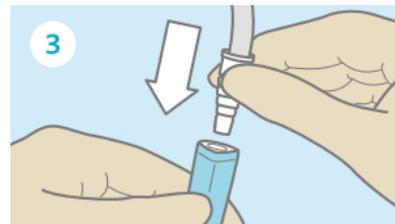


Ziehen Sie den Griff ca. 2 cm nach oben, bis ein Widerstand spürbar ist. In dieser Position können Sie einen Urinbeutel anschließen.

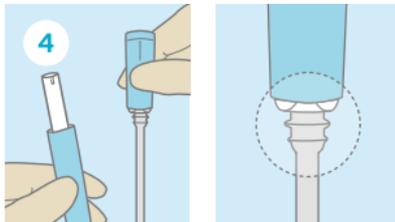

Ziehen Sie den Griff – ohne den Katheter zu biegen – so weit nach oben, bis der Katheter sowie beide Ringe unterhalb des Griffes zu sehen sind.

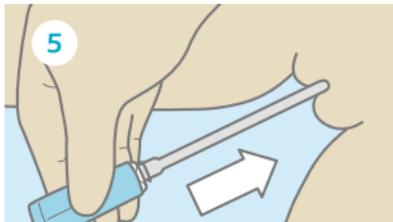

Führen Sie den Katheter dann vorsichtig in die Harnröhre ein.

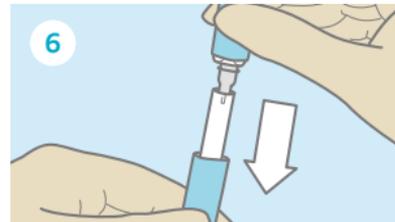

Um den Katheter problemlos zu transportieren und im Hausmüll zu entsorgen, schieben Sie den Katheter zurück in die Verpackung.

Ihre Harnröhre verdient bestmöglichen Schutz

Der richtige Katheter kann bei fachgerechter Anwendung Reibung minimieren und damit helfen, das Risiko von Harnwegsinfektionen zu reduzieren.

Die **Katheteraugen** von SpeediCath® Compact Eve werden in einem zusätzlichen Produktionsschritt **glatt poliert**, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren.

Eine ISK-Nutzerin führt durchschnittlich

1.825-Mal

im Jahr einen Katheter in ihre Harnröhre ein und wieder hinaus.²

Für eine gesunde und regelmäßige Blasenroutine

PVC-frei

Die **hydrophile Beschichtung**, die SpeediCath® Compact Eve gleichmäßig umgibt, ist optimal an das Feuchtigkeitsmilieu der empfindlichen Schleimhaut in der Harnröhre angepasst und hilft damit, Irritationen während des Katheterisierens zu verringern.



Produktinformationen zu SpeediCath® Compact Eve



Für kostenlose Muster den
QR-Code scannen oder auf
de.coloplast.at/compacteve
bestellen.

SpeediCath® Compact Eve, Nelaton



Artikel-Nr.	Länge	Größe	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
28110	9 cm	● 10 CH	30	50721	048
28112	9 cm	○ 12 CH	30	50721	048
28114	9 cm	● 14 CH	30	50721	048



»SpeediCath® Compact Eve ist
so sanft in der Anwendung –
es ist einfach und angenehm.«

Tabitha, ISK-Anwenderin



SpeediCath® Compact Eve Anwendungsvideo

Bitte scannen Sie den QR-Code
oder nutzen Sie folgenden Link:

de.coloplast.at/compacteve-anwendung



Wenn Sie Fragen rund um die Kontinenzversorgung haben, können Sie jederzeit gern unser **Coloplast Beratungsservice** unter **+43 1 707 57 51 54** kontaktieren.

Sie erreichen uns telefonisch
Mo – Do von 9 – 16 Uhr & Fr von 9 – 12 Uhr
und per E-Mail unter
beratungsservice.at@coloplast.com.

Bei medizinischen Anliegen wenden Sie sich
bitte an Ihre Pflegefachkraft.

Referenzen

- 1 Anwenderbefragung zur Nutzung von SpeediCath® Compact Eve in 13 Ländern, n=1.176. SpeediCath® Compact Eve Pre-Evaluation among users, Coloplast, 2015. Data-on-file (PM-01352). Die Ergebnisse stammen aus Untersuchungen, die von Coloplast nicht veröffentlicht wurden.
- 2 Die Berechnung basiert auf den EAUN-Richtlinien, die erwachsenen Patienten empfehlen, sich 4- bis 6-mal am Tag zu katheterisieren. Wenn sich ein Erwachsener an 365 Tagen 5-mal täglich katheterisiert, sind es 1.825 Katheterisierungen.

[Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology](#)

210NIP315Z / PM-25663

Coloplast GmbH, Thomas-Kleist-Platz 10, 1030 Wien, Telefon +43 1 7075751-0, Fax +43 1 7075751-40, atbestellung@coloplast.com
www.coloplast.at The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2023-02. All rights reserved Coloplast A/S

