

Conveen® Bein- und Bettbeutel

Für aktive Tage und ruhige Nächte

Conveen®





Harnableitung mit System

Conveen® Beinbeutel ergänzen Ihre Harnableitungsversorgung

Conveen® Beinbeutel werden an Kondomurinale sowie Katheter angeschlossen und ermöglichen somit ein ideales Harnableitungssystem.

Einer aussagekräftigen Studie zufolge kann Conveen® die Lebensqualität und das Selbstwertgefühl der Anwender positiv beeinflussen.¹ Denn der Urin wird nicht einfach nur aufgesaugt, sondern stattdessen vom Körper weggeleitet – für mehr Freiheit und Flexibilität.

Eine Auswahl an Conveen® Produkten ist PVC- und Phthalatfrei und damit weder gesundheitsschädlich noch problematisch für die Umwelt. Phthalate werden oft als Weichmacher in Kunststoffprodukten eingesetzt. Ihre Anwendung in Kinderspielzeug und Kosmetika wurde jedoch untersagt. Achten Sie auf den hier gezeigten Aufkleber auf den Produktverpackungen.

So breit wie die Bedürfnisse der Anwender gefächert sind, ist auch das Angebot an Conveen® Beinbeuteln.



KEIN PVC
KEINE
PHTHALATE

1. Chartier-Kastler E et al.: Randomisierte, prospektive, multizentrische Crossover-Studie zum Vergleich der Lebensqualität von Männern mit Harninkontinenz bei Verwendung von Kondomurinalen gegenüber Windeln. British Journal of Urology, Veröffentlichung September 2010.

Conveen® Active



Für eine diskrete und verlässliche Versorgung den ganzen Tag

Das moderne Design und das kleinere Beutelvolumen von 250 ml ermöglichen Ihnen nicht nur ein aktives Leben mit Familie und Freunden, sondern sorgen auch für höchste Diskretion selbst unter kurzen Hosen oder heller Kleidung.

Der Beinbeutel wird ohne zusätzlich benötigte Befestigungsbänder oder Halterungen mühelos am Oberschenkel befestigt und bietet sogar beim Sport sicheren Halt.

Ein kürzbarer Schlauch sorgt für optimalen Sitz und noch mehr Bewegungsfreiheit, während der Beutel selbst kaum sichtbar ist.

Der Conveen® Active Beinbeutel verfügt über

- › eine integrierte, komfortable und elastische Befestigung
- › einen sanften Klebeverschluss für sicheren Halt
- › einen flexiblen Silikonauslass
- › einen knicksicheren und kürzbaren Anti Reflux Schlauch

Über den weichen verdeckten Silikonauslass ist es möglich, Conveen® Active ganz normal in die Toilette zu entleeren, ohne den Beutel vorher vom Kondom-urinal zu trennen.

Conveen® Security Plus Beinbeutel



Individuell und komfortabel


Conveen® Security Plus Beinbeutel haben einen Anti-Knick-Schlauch, um das Risiko eines Urinrückflusses zu reduzieren.

Der speziell entworfene Klappverschluss ist einfach zu bedienen, denn es kann leicht verifiziert werden, ob dieser offen oder geschlossen ist und erleichtert eine sichere Handhabung.

Das weiche Vlies auf der körperzugewandten Seite bietet einen angenehmen Tragekomfort. Eine im unteren Beutelteil angebrachte Schweißnaht vermindert ein Ausbeulen des Beutels.

Diskretes Design und unauffällige Farbgebung lassen den Beutel selbst unter heller Kleidung kaum erkennen.

Conveen® Contour Mehrkammer- Beinbeutel

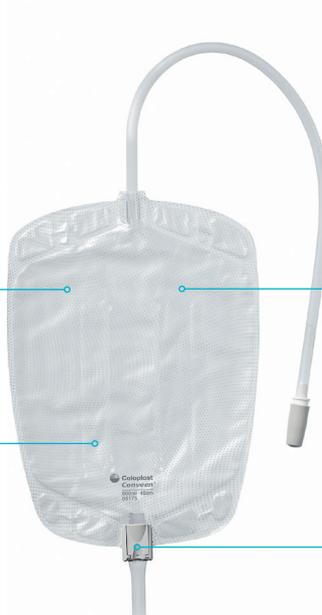

Weiches Vlies
(auf der Beutelrückseite)

Erweitertes Kammerdesign
(Neun integrierte Kammern)

Diskretes und modernes Design

Flacher Klappverschluss

Besonders geräuscharm und diskret


Der Conveen® Contour Mehrkammer-Beinbeutel wurde für eine gleichmäßige Verteilung des Urins entworfen.

Als einziger Beutel am Markt hat er neun integrierte Kammern, wodurch der Urin gleichmäßig im Beutel verteilt wird. Die Unterteilung verhindert ein Schwappgeräusch und ermöglicht somit mehr Diskretion.

Mit dem speziell entworfenen Klappverschluss ist es leicht zu erkennen, ob der Beutel offen oder geschlossen ist. Das weiche Vlies auf der körperzugewandten Seite gewährt einen angenehmen Tragekomfort.

Dank des diskreten Designs mit entsprechender Farbgebung ist der Beutel auch unter heller Kleidung kaum sichtbar.

Conveen® Security Plus Bettbeutel

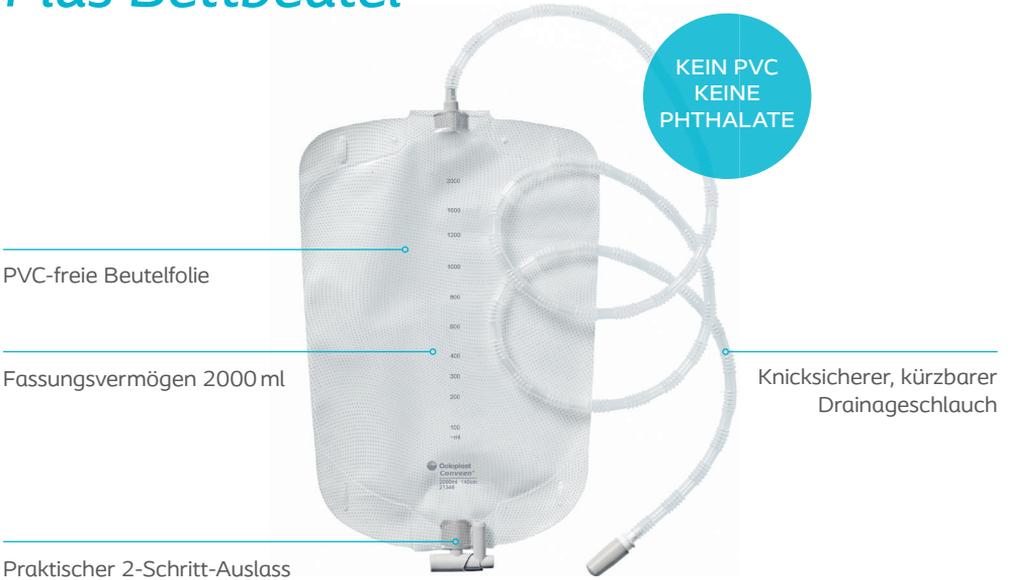


Behindertengerecht und PVC-frei

Der Conveen® Bettbeutel, mit einem Fassungsvermögen von 2000 ml, eignet sich besonders für Anwender mit hoher Infektgefährdung. Der 140 cm lange Drainageschlauch gibt Bewegungsfreiheit und kann individuell auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Der 2-Schritt-Auslass ist auch mit einge-

schränkter Hand- oder Fingerfunktion zu bedienen. Der Auslass zeigt im geschlossenen Zustand nach oben und ist daher tropfsicher. Ösen erleichtern die Befestigung mit der Conveen® Beutel-Aufhängung am Bett. Die PVC-freie Beutelfolie ist auch für besonders empfindliche Anwender geeignet.

Conveen® Standard Nachtbeutel

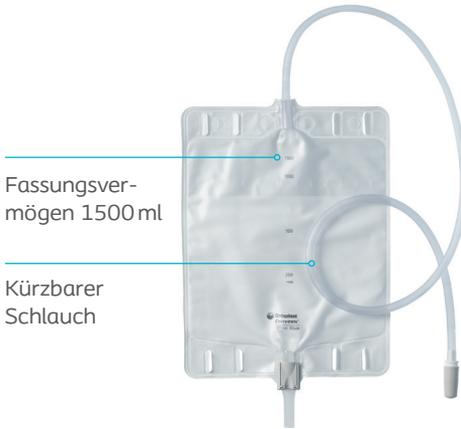

Der Conveen® Nachtbeutel, mit einem Fassungsvermögen von 1500 ml, ist multifunktional einsetzbar. Dank des körperseitigen Vlieses kann er auch tagsüber am Bein getragen werden. Seine Ösen eignen sich sowohl für Beinbänder als auch für die Conveen® Beutel-Aufhängung. Der 90 cm lange Schlauch kann individuell gekürzt werden. Das flache Kippventil als Auslass und die Rückflusssperre sorgen für eine leichte und sichere Handhabung.

Conveen® Beutel-Aufhängung



Die Conveen® Beutel-Aufhängung ist für alle Nacht- und Bettbeutel mit Aufhängerösen geeignet. Der praktische, runde Aufhänger wird in die Führungsöse des Hängers eingelegt und um 90° gedreht. Nun kann der Hänger am Bettgestell oder am Bettrahmen eingehängt werden. Der Nacht- oder Bettbeutel wird mit dem Drainageschlauch in die Schlauchführung eingeklemmt und der Beutel mit den Ösen in die äußeren Hängerzapfen eingehängt.

Conveen® Befestigungsbänder

Conveen® Befestigungsbänder sind aus einem weichen, elastischen Material gefertigt und zeichnen sich so durch einen hohen Tragekomfort aus. Die Bänder sind kürzbar und können mit dem praktischen Klettverschluss an jedes Bein optimal angepasst werden. Der Beutel wird mit Hilfe von Knöpfen am Band angebracht. Somit ist ein Versorgungswechsel möglich ohne die Bänder zu öffnen und neu am Bein befestigen zu müssen.



Conveen® Beinlinge

Conveen® Beinlinge befestigen ebenso wie die Conveen® Befestigungsbänder den Beinbeutel am Ober- oder Unterschenkel. Bei der Verwendung eines Beinlings streifen Sie diesen erst über das Bein und platzieren dann den Beutel darin. Die besonders hautfreundlichen und dehnbaren Conveen® Beinlinge sind bei Beschwerden durch Druckstellen optimal geeignet.



Produktinformationen

Conveen® Active, Beinbeutel mit integrierter Befestigung



Artikel-Nr.	Volumen/ml	Schlauchlänge/cm	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
255010	250	7	10	50741	067

Conveen® Security Plus Beinbeutel – S = steril



Artikel-Nr.	Volumen/ml	Schlauchlänge/cm	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
051600	500	30*	10	50741	027
051660	750	30*	10	50741	027
051650	350	50*	10	50741	027
051610	500	50*	10	50741	027
051670	750	50*	10	50741	027
S 051621	500	30	10	50740	019
S 051631	500	50	10	50740	019

Conveen® Contour Mehrkammer-Beinbeutel – S = steril



Artikel-Nr.	Volumen/ml	Schlauchlänge/cm	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
051700	600	45*	10	50741	045
S 051720	600	05	10	50740	025
S 051770	800	65	10	50740	026

*kürzbar

Conveen® Security Plus Bettbeutel



Artikel-Nr.	Volumen/ml	Schlauchlänge/cm	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
213460	2000	140*	10	50744	032

Conveen® Standard Nachtbeutel



Artikel-Nr.	Volumen/ml	Schlauchlänge/cm	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
050620	1500	90*	10	50741	027

Conveen® Befestigungsbänder



Artikel-Nr.	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
050501	20 Stück/10 Paar	50774	014

Conveen® Beinling



Artikel-Nr.	Beinumfang/cm	Größe	St./VE	Pos. Nr.	Lfd. Nr.
783686	● 40 – 46	Medium	10	50775	019
783694	● 47 – 64	Large	10	50775	019
783708	● ab 65	X-Large	10	50775	019

Conveen® Beutel-Aufhängung



Artikel-Nr.	St./VE
050700	01

Coloplast entwickelt Produkte und Serviceleistungen, die das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Fachkräften und Anwendern finden wir gemeinsam neue Wege für eine bessere Versorgung.

Wir vertreiben hochwertige Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und die Urologie. Wir sind ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 12.000 Mitarbeitern.

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

210N IP 221 Z / PM-16113

Coloplast GmbH, Thomas-Kleist-Platz 10, 1030 Wien, Telefon +43 1 7075751-0, Fax +43 1 7075751-30, atbestellung@coloplast.com
www.coloplast.at The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2021-04. All rights reserved Coloplast A/S

