


Jan Jaguar und seine Freunde

»Katheterisieren ist ganz einfach, wir zeigen Dir wie's geht!«

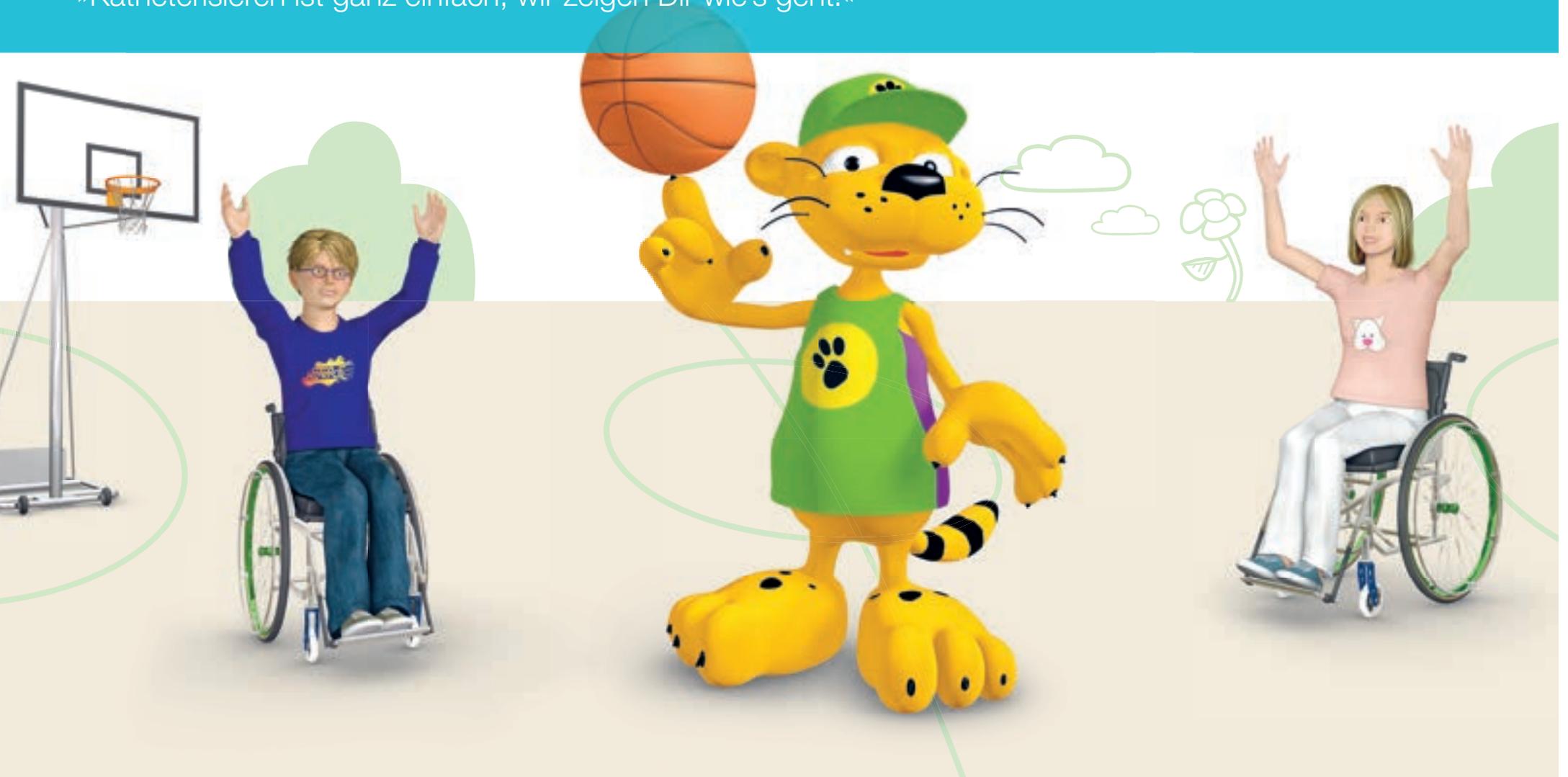



»Hallo Freunde,
ich bin Jan Jaguar.
Und wer seid ihr?«

Ich bin Jan Jaguar. In diesem Buch will ich euch zusammen mit meinen beiden Freunden Hanna und Dennis zeigen, wie ihr mit einem Katheter eure Blase entleert. Neu ist das für euch ja nicht, denn bislang haben eure Eltern oder ein anderer Erwachsener das gemacht. Und wäre es nicht viel praktischer, es selbst zu machen?

»Toll, dass ihr da seid, ich bin Dennis.«

Ich habe Hanna und Dennis gefragt, ob sie mir dabei helfen, euch das Katheterisieren zu zeigen. Natürlich haben sie sofort »Ja!« gesagt, denn sie fanden es ganz schön aufregend, mal in einem Buch vorzukommen und dort zu erzählen, wie das Katheterisieren geht und wie das beim ersten Mal so geklappt hat.



»Na Ihr, ich bin Hanna!«

Ihr werdet sehen, es ist gar nicht so schwer, einen Katheter richtig zu benutzen. Wenn ihr mit eurem Arzt oder eurer Ärztin gesprochen und dieses Buch gelesen habt, wisst ihr, wie's geht. Zu Anfang sollten eure Eltern oder eine andere Person, die sich auskennt, dabei sein. Und ganz bestimmt kommt ihr bald ohne Hilfe zurecht.



»Wisst Ihr eigentlich, wo der Urin herkommt?«

Wer Hunger oder Durst hat, muss etwas essen oder trinken – logisch. Aber was wird eigentlich aus Spaghetti, Apfelsaft und Kuchen, wenn man sie runtergeschluckt hat? Zuerst kommt alles in den Magen, wo es gut gemischt wird. Vom Magen kommt das Ganze in den Darm. Dort wird es sortiert. Die Nährstoffe – also das, was der Körper täglich braucht – und die Flüssigkeit gehen ins Blut. Der Rest kann nicht weiterverwertet werden und wird über den Darm ausgeschieden.




Nahrung im Mund

Nahrung im Magen



Nahrung im Darm

Rest wird ausgeschieden

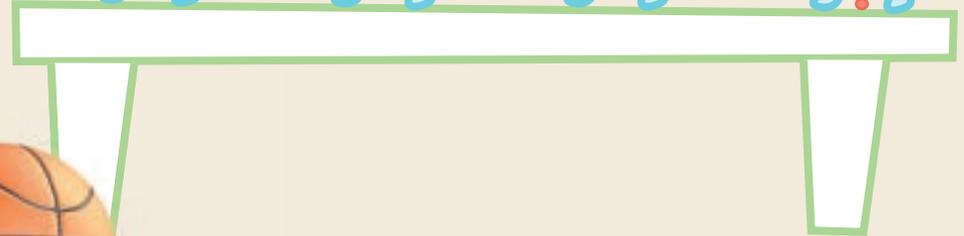


»Die Nieren sind wie ein Sieb in unserem Körper«

Das Blut mit den Nährstoffen und der Flüssigkeit wird durch die Nieren gepumpt. Die funktionieren wie ein Sieb. Sie reinigen das Blut und schicken die Flüssigkeit und die Stoffe, die nicht mehr gebraucht werden, durch die Harnleiter in die Blase. Wenn die Blase voll ist, muss sie geleert werden. Über die Harnröhre wird der angesammelte Urin nach draußen geleitet.

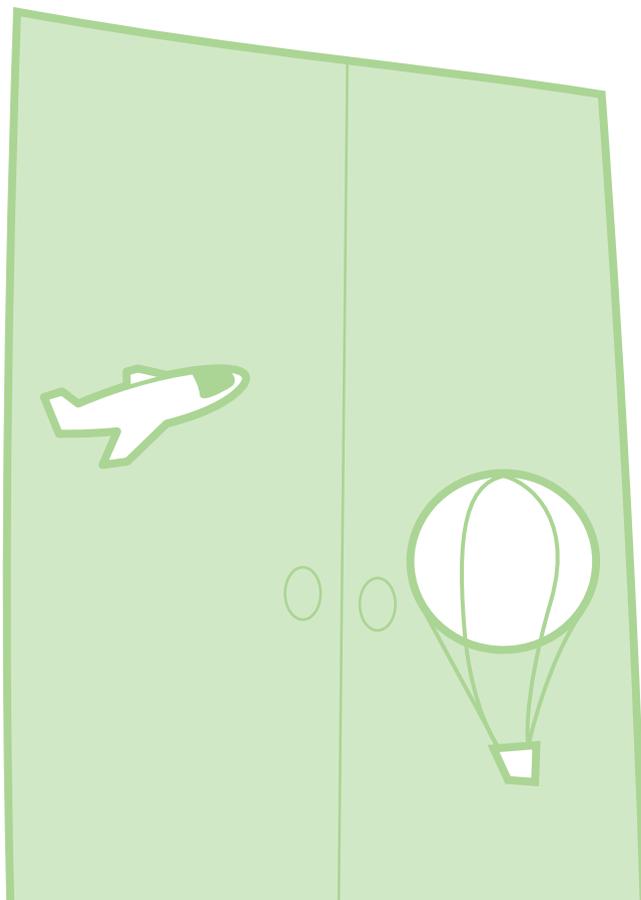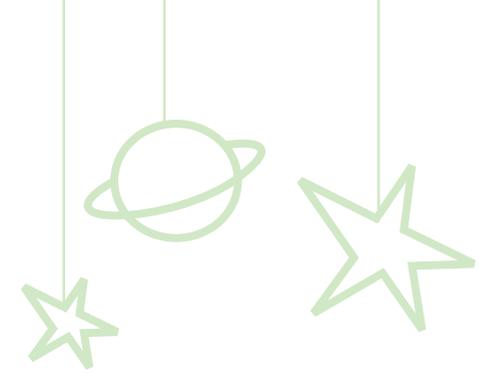


»Wie funktioniert überhaupt die Blase?«

Die Blase sitzt ungefähr eine Hand breit unter deinem Bauchnabel. Im Prinzip ist es mit der Blase ähnlich wie mit einem Luftballon. Füllt man ihn zu stark mit Wasser auf, geht er kaputt.

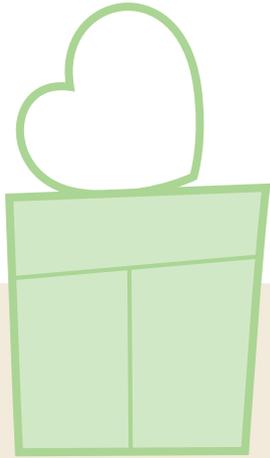

Natürlich kann die Blase nicht platzen, aber es ist nicht gut, wenn sie zu voll wird. Darum muss man sie regelmäßig entleeren. Und genau wie ein Luftballon, aus dem man das Wasser herauslässt, wird auch die Blase ganz klein, wenn der Urin herausfließt.

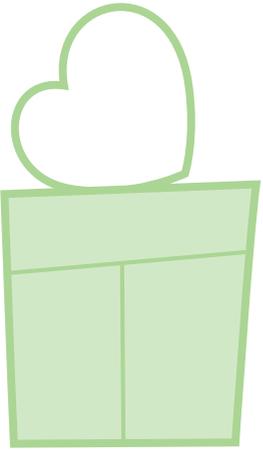

»Wenn der Katheter der Blase helfen muss«

Über Nerven und Muskeln kann man bestimmen, wann die Blase geleert werden soll. Wenn diese nicht richtig funktionieren, holt man den Urin mit einem Katheter aus der Blase heraus. Und wie das geht, zeigen wir dir auf den nächsten Seiten.

Da es bei Mädchen und Jungen einige Unterschiede gibt, erklären wir das Katheterisieren einmal für Mädchen und einmal für Jungen.





»Los geht's mit der Anleitung für Mädchen«





Weil meine Freundin Hanna das viel besser erklären kann als ich, zeigt sie dir jetzt, wie du richtig mit dem Katheter umgehst.

»Hallo Hanna!«



»Hallo Freunde!«

Ich brauche schon lange einen Katheter und seit einiger Zeit kann ich ihn ganz allein benutzen. Ich zeige dir jetzt, wie ich mich selbst katheterisiere. Wenn du genau zuschaust, kannst du das auch bald allein. Es ist nämlich gar nicht so schwer.



»Mädels, so geht das.«

Zuerst wasche ich mir die Hände ganz gründlich mit Seife. Sie müssen richtig sauber sein. Zusätzlich zur Seife braucht man auch noch ein Desinfektionsmittel. Seife macht sauber, aber nur ein Desinfektionsmittel tötet die schädlichen Bakterien.

1. Hände waschen.



2. Alles bereitlegen.



Jetzt lege ich alles, was ich brauche, so hin, dass ich gut herankomme:



Natürlich muss ich auch meine Hose oder meinen Rock und meine Unterhose herunterziehen.



3. Spiegel befestigen.



Wenn ich auf der Toilette sitze, befestige ich den Spiegel am Oberschenkel, damit ich gut sehe, wo der Katheter hineinmuss.



Ich benutze den Katheter SpeediCath® Compact von Coloplast. Das ist ein Katheter, bei dem man kein Wasser oder Gleitmittel dazugeben muss. Er ist also schon ganz glitschig in der Verpackung, so dass ich ihn gleich benutzen kann.

So geht das bei Mädchen.



4. Katheter öffnen.

Ich halte den Katheter mit dem Fuss nach unten, dann öffne ich den Katheter indem ich die beiden ineinander gesteckten Röhrrchen vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung drehe und langsam auseinander ziehe.





Jan Jaguars Tipp!

Wenn Hanna unterwegs ist, hat sie immer einen Urinbeutel dabei. Wenn keine Toilette in der Nähe ist, kann sie den Katheter an den Urinbeutel anschließen und den Urin in den Beutel abfließen lassen. Sie kann die Katheter und die Beutel problemlos im Rucksack oder in der Tasche mitnehmen.

5. Katheter herausziehen.



Dann hole ich den Katheter aus der Packung, indem ich ihn immer ganz hinten, also am Auslauftrichter, anfasse. Danach stelle ich den Katheter mit dem Griff nach unten z. B. auf dem Waschbeckenrand ab. Ich muss immer darauf achten, dass ich den oberen Teil des Katheters nicht berühre, damit keine Bakterien auf den Katheter kommen.



So geht das bei Mädchen.

6. Hände und Intimbereich desinfizieren.



Weil keine Bakterien in die Harnröhre hineinkommen dürfen, muss ich meine Hände gründlich mit dem Händedesinfektionsmittel sauber machen.




Anschließend halte ich mit einer Hand die Schamlippen auseinander und mit der anderen sprühe ich das Desinfektionsmittel auf die Scheide. Dieses sollte ca. 1 Minute einwirken, bevor der Katheter eingeführt wird.

Benutze immer ein Desinfektionsmittel, das für die viel empfindlichere Haut in der Umgebung der Scheide geeignet ist. Das Mittel hat dir dein Arzt verschrieben und auch genau erklärt, wie du es anwenden musst.

Es ist wichtig, dass der Katheter nirgendwo anstößt. Wenn das doch mal passiert, ist das nicht weiter schlimm. Wirf den Katheter weg und nimm einfach einen neuen!

7. Harnröhreneingang.

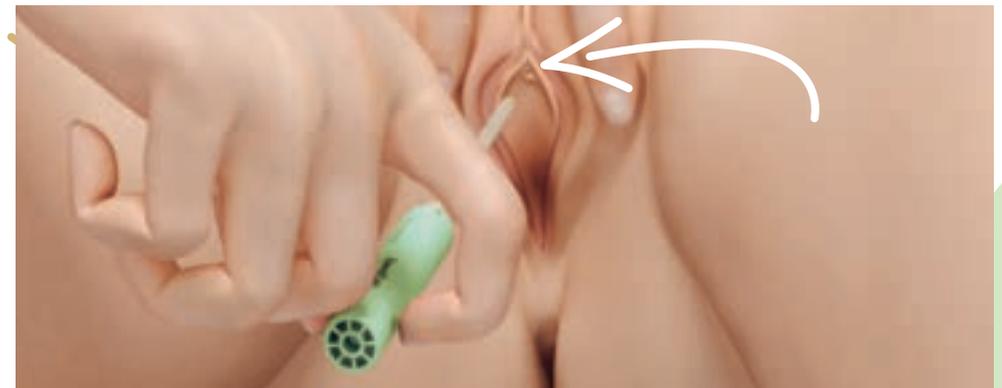

Das ist der Harnröhreneingang. Hier muss der Katheter hinein, damit der Urin herauskommt.

8. Katheter einführen.

Jetzt schiebe ich den Katheter ganz vorsichtig und langsam in die Harnröhre, denn wenn ich zu ungeduldig bin und den Katheter zu schnell einführe, kann ich mir wehtun. Ist der Katheter weit genug drin, kommt der Urin heraus.



Wenn kein Urin mehr kommt, ziehe ich den Katheter langsam ein Stück heraus. Dabei drehe ich ihn etwas. Dann kommt meistens noch ein bisschen Urin hinterher.



Wenn nichts mehr kommt, ist die Blase leer. Ich ziehe dann den Katheter ganz heraus, entleere gegebenenfalls den Urinbeutel in die Toilette und werfe Katheter und Urinbeutel in den Mülleimer.

9. Noch mal Hände waschen.



Jetzt noch einmal gründlich die Hände waschen und schon kann ich wieder raus zum Spielen.




Jan Jaguar

Hast du denn gleich beim ersten Mal alles hinbekommen?



Jan Jaguar

War das zu Anfang denn nicht ziemlich schwer für dich?

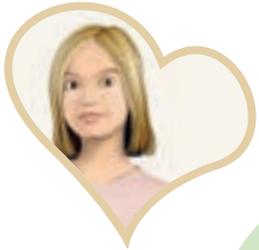

Hanna

Na ja, natürlich haben mir meine Eltern zuerst geholfen und mir alles ganz genau gezeigt. Aber dann habe ich immer mehr selbst gemacht und nach kurzer Zeit konnte ich es dann ganz allein.



Hanna

Nein, eigentlich nicht. Aber etwas üben musste ich schon.



»Viel Spaß beim Üben!«

Hanna hat es geschafft. Sie kann sich jetzt selbst katheterisieren. Mit Hannas toller Erklärung und der Hilfe deiner Eltern kannst du es nun auch versuchen. Bestimmt schaffst du das bald schon ganz allein.



»Und jetzt zeigen wir, wie das Katheterisieren bei Jungen funktioniert!«






Weil Dennis sich schon prima allein katheterisieren kann, zeigt er dir jetzt, wie du richtig mit dem Katheter umgehst.

»Hallo Dennis!«

»Hallo Freunde!«

Ich brauche schon lange einen Katheter und seit einiger Zeit kann ich ihn ganz allein benutzen. Ich zeige dir jetzt, wie ich mich selbst katheterisiere. Wenn du genau zuschaust, kannst du das auch bald allein. Es ist nämlich gar nicht so schwer.

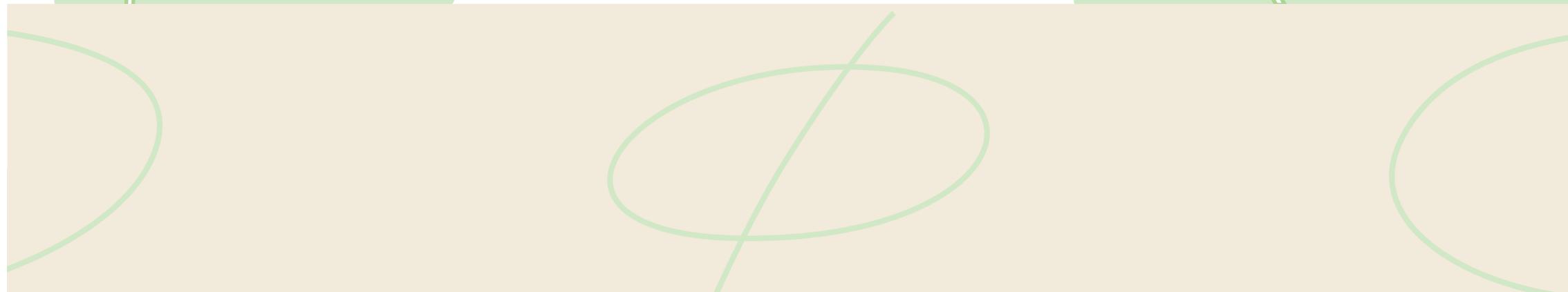



»Jungs, so geht das.«

Zuerst wasche ich mir die Hände ganz gründlich mit Seife. Sie müssen richtig sauber sein. Zusätzlich zur Seife braucht man auch noch ein Desinfektionsmittel. Seife macht sauber, aber nur ein Desinfektionsmittel tötet die schädlichen Bakterien.


1. Hände waschen.



2. Alles bereitlegen.



➔ Jetzt lege ich alles, was ich brauche, so hin, dass ich gut herankomme. Ich benutze nur die Dinge, die mir auch mein Arzt verschrieben hat:

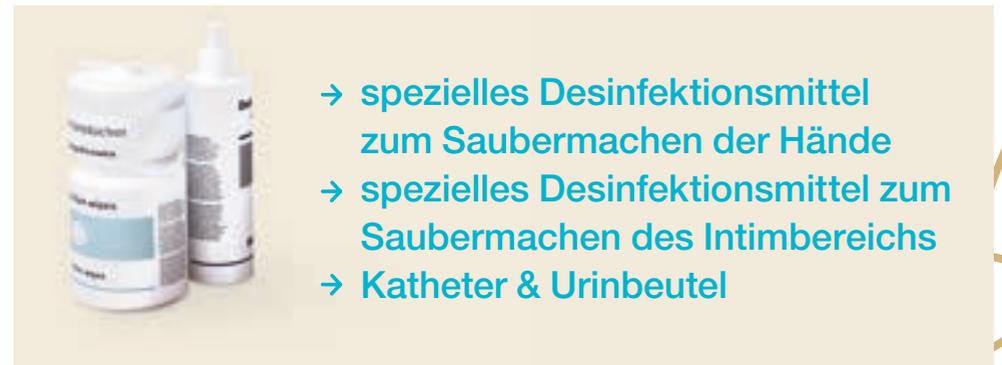

Natürlich muss ich auch meine Hose und meine Unterhose herunterziehen.



So geht das bei Jungs.



Ich benutze den Katheter SpeediCath® von Coloplast. Das ist ein Katheter, bei dem man kein Wasser oder Gleitmittel dazugeben muss. Er ist also schon ganz glitschig in der Verpackung, so dass ich ihn gleich benutzen kann.

3. Verpackung öffnen und ankleben.



Ich mache die Verpackung des Katheters oben, wo der Klebepunkt ist, so weit auf, dass der bunte Auslauftrichter herausguckt. Mit dem Klebepunkt an der Verpackung kann ich den Katheter z. B. an meinen Rollstuhl oder an die Badezimmerfliesen kleben, damit ich beide Hände frei habe.

4. Unterhose befestigen/herunterziehen.




An dem praktischen Hosenhügel kann ich meine Unterhose befestigen um meine Hände frei zu haben. Ich lege den Hügel einfach zwischen meine Beine und stülpe die Unterhose drüber. Alternativ kannst du dich auch, wenn möglich, vor die Toilette stellen und deine Unterhose einfach runter lassen.



5. Hände und Intimbereich desinfizieren.

Weil keine Bakterien in die Harnröhre hineinkommen dürfen, muss ich meine Hände gründlich mit dem Händedesinfektionsmittel sauber machen.

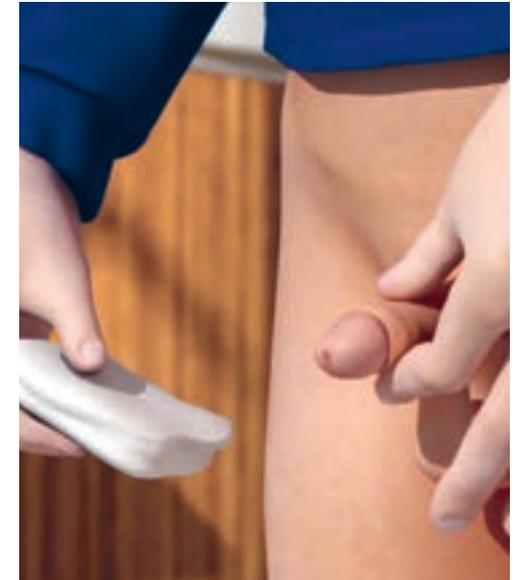

Dann nehme ich meinen Penis und ziehe die Vorhaut zurück. Das kleine Loch, das ich jetzt sehe, ist der Harnröhreingang. Wenn ich den Daumen direkt daneben lege und mit leichtem Druck vorsichtig zur Seite schiebe, öffnet sich der Harnröhreingang etwas weiter. So kann ich später den Katheter besser einführen.

Mit der anderen Hand sprühe ich das spezielle Desinfektionsmittel für den Intimbereich auf, das für die viel empfindlichere Haut des Penis geeignet ist. Bevor der Katheter eingeführt wird, sollte das Desinfektionsmittel ca. 1 Minute eingewirkt sein. Wenn ich Pads benutze, wische ich vorsichtig und gründlich über den Penischaft bis alles sauber ist.

Benutze immer ein Desinfektionsmittel, das für die viel empfindlichere Haut des Penis geeignet ist. Das Mittel hat dir dein Arzt verschrieben und auch genau erklärt, wie du es anwenden musst.





So geht das bei Jungs.

6. Katheter halten.



Wenn du einen Urinbeutel benutzt, wird dieser an den bunten Auslauftrichter angeschlossen. Dann hole ich den Katheter aus der Packung, indem ich ihn immer ganz hinten, also am Auslauftrichter, anfasse. Es ist wichtig, dass der Katheter nirgendwo anstößt.

**Wenn das doch mal passiert,
ist das nicht weiter schlimm.
Wirf den Katheter weg und
nimm einfach einen neuen!**



7. Katheter einführen.



Den Penis strecke ich nach oben in Richtung Bauch und schiebe den Katheter ganz vorsichtig und langsam in die Harnröhre.

8. Jetzt kommt der Urin.

Wenn ich ein bisschen Widerstand spüre, nehme ich den Penis wieder etwas runter und schiebe den Katheter vorsichtig weiter, bis Urin herauskommt. Und dann noch ein kleines Stück weiter. Ich mache das immer besonders vorsichtig, denn wenn ich zu ungeduldig bin und den Katheter zu schnell einführe, kann es sein, dass der Katheter den Weg nicht findet und ich mir wehtue.



Wenn kein Urin mehr kommt, ziehe ich den Katheter langsam ein Stück heraus. Dabei drehe ich ihn etwas. Dann kommt meistens noch ein bisschen Urin hinterher.



9. Noch mal Hände waschen.



Jetzt noch einmal gründlich die Hände waschen und schon kann ich wieder raus zum Spielen.




Jan Jaguar

Hast du denn gleich beim ersten Mal alles hinbekommen?



Dennis

Na ja, natürlich haben mir meine Eltern zuerst geholfen und mir alles ganz genau gezeigt. Aber dann habe ich immer mehr selbst gemacht und nach kurzer Zeit konnte ich es dann ganz allein.

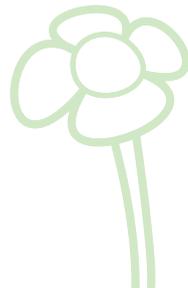

So geht das bei Jungs.



Jan Jaguar

War das zu Anfang denn nicht ziemlich schwer für dich?



Dennis

Nein, eigentlich nicht. Aber etwas üben musste ich schon.



»Viel Spaß beim Üben!«

Dennis hat es geschafft. Er kann sich jetzt selbst katheterisieren. Mit Dennis' toller Erklärung und der Hilfe deiner Eltern kannst du es nun auch versuchen. Bestimmt schaffst du das bald schon ganz allein.

»Bestimmt hast du noch ein paar Fragen, oder?«

Solltest du mal Fragen zum Katheterisieren haben oder Probleme damit bekommen, wende dich an deinen Arzt oder deine Ärztin. Sie können dir am besten helfen. Da viele Kinder aber die gleichen Fragen zum Katheterisieren haben, findest du die häufigsten von ihnen mit meinen Antworten auf den nächsten Seiten. Und wenn du noch mehr wissen willst, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich freue mich schon drauf.

beratungsservice.at@coloplast.com



Timo

Lieber Jan! Wenn ich in der Schule Katheter benutzen will, was muss ich dann beachten?



Jan Jaguar

Überlege dir zusammen mit deinen Eltern, wie viele Katheter du brauchst. Nimm zur Vorsicht noch einen als Reserve mit und denk auch an die Desinfektionsmittel. So hast du alles da, was du brauchst.



Andrea

Hallo, Jan! Ich habe gerade mit dem Selbstkatheterisieren angefangen. Wie oft muss ich das am Tag machen?



Jan Jaguar

Ganz genau weiß das dein Arzt. Frag ihn einfach! Normalerweise benutzen Kinder 4 bis 6-mal am Tag einen Katheter. Das erste Mal, wenn sie morgens aufstehen, das letzte Mal abends vorm Schlafengehen.



Tobias

Lieber Jan! Manchmal lässt sich mein Katheter nicht weiter vorschieben. Was soll ich dann machen?



Jan Jaguar

Nicht mit Kraft versuchen, den Katheter weiterzuschieben. Warte ein bisschen, hole tief Luft oder versuch mal zu lachen. Das lockert deine Muskeln. Wenn's trotzdem nicht klappt, versuche es fünf Minuten später noch einmal von vorn mit einem neuen Katheter.





Lukas

Hallo, Jan! Ich habe mal einen Katheter gehabt, bei dem die Verpackung schon offen war. Kann ich ihn dann noch benutzen?



Jan Jaguar

Diesen Katheter musst du wegwerfen. Das ist nicht weiter schlimm, aber es ist wichtig, dass du einen neuen Katheter nimmst, der noch in einer geschlossenen Verpackung ist. Nur so ist sicher, dass der Katheter bakterienfrei ist.



Carolin

Lieber Jan! Was muss ich tun, wenn mir mein Katheter runterfällt?



Jan Jaguar

Das kann immer einmal passieren und ist nicht weiter tragisch. Wenn der Katheter runterfällt oder du damit aus Versehen irgendwo angestoßen bist, nimmst du einfach einen neuen Katheter. Damit verhinderst du, dass du durch einen unsterilen Katheter eine Infektion bekommst. Den alten Katheter kannst du nicht mehr benutzen. Er gehört auf jeden Fall in den Mülleimer.





Inga



Hallo, Jan! Mir ist es schon mal passiert, dass mein Katheter zwar in der Blase war, aber kein Urin rausgekommen ist. Woran liegt das?



Jan Jaguar

Es kann sein, dass der Katheter noch nicht ganz in der Blase angekommen ist. Dann kannst du versuchen, ihn vorsichtig noch ein wenig weiter vorzuschieben oder zu drehen. Manchmal hilft auch Husten oder Lachen. Bei Mädchen kann es passieren, dass sie den Katheter nicht in den Harnröhreneingang, sondern in die Scheide eingeführt haben (du kannst vorn in diesem Buch noch einmal nachschauen, wo sich der Harnröhreneingang befindet). Dann einfach mit einem neuen Katheter noch mal von vorn anfangen.




Simon

Guten Morgen, Jan! Irgendwie roch mein Urin gestern Abend komisch und sah auch ganz anders aus als sonst, etwas trübe. Außerdem habe ich gestern den Tag über immer wieder zwischen dem Katheterisieren etwas Urin verloren. Bin ich jetzt krank?



Jan Jaguar

Du solltest unbedingt mit deinen Eltern zum Arzt fahren, der deinen Urin dann untersucht. Es kann sein, dass du eine Entzündung hast. Der Arzt verschreibt dir dann ein Medikament, damit die Entzündung wieder weggeht.

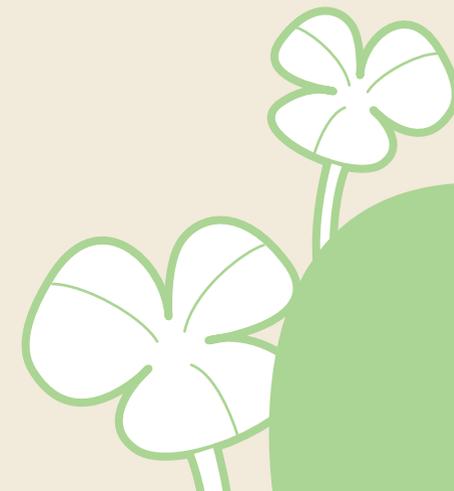

»Hier gibt's für jeden den richtigen Katheter«

Von Coloplast gibt es ganz viele Katheter in unterschiedlichen Größen. Denn Kinder und Erwachsene, Jungen und Mädchen, Männer und Frauen brauchen alle verschiedene Katheter. Es gibt Katheter für unterwegs, die sich in einem Urinbeutel befinden, und Katheter, die man sofort benutzen kann. Darüber haben wir ja schon gesprochen. So findet jeder – in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin – den Katheter, den er braucht.



»Bestimmt ist auch für dich der passende Katheter dabei«

Katheter gibt es in verschiedenen Durchmessern. Der Durchmesser wird in Charrière (CH) angegeben, wenn du die Charrièreangabe durch 3 teilst, hast du den Durchmesser in Millimetern. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt es die Katheter in verschiedenen Längen. Welche Charrièregröße und welche Länge du brauchst, weiß dein behandelnder Arzt oder deine behandelnde Ärztin.





Liebe Eltern

Gerne senden wir Ihnen kostenlos Muster zum Ausprobieren zu. Benutzen Sie zum Bestellen bitte die Postkarte auf der nächsten Seite. Kreuzen Sie hier einfach die passende Kathetergröße für Ihr Kind an und schicken Sie uns die unterschriebene Karte zu.

Sie haben auch Fragen zum Thema Darmmanagement? Bestellen Sie den kostenlosen Ratgeber gleich mit oder melden Sie sich telefonisch, wir helfen gerne weiter:

Österreich

Coloplast Beratungsservice 01 7075751-54 zum Ortstarif

Deutschland

Coloplast ServiceTelefon 0800 780 9000, kostenfrei

Schweiz

ServiceTelefon 041 7997979

Angaben zum behandelnden Arzt/Ärztin

Name

Adresse

Unterschrift



SpeediCath®

Mein KatheterPass



Liebe Kinder

Den KatheterPass auf dieser Seite könnt ihr ausschneiden und ausfüllen. Bittet euren Arzt oder eure Ärztin bei eurem nächsten Besuch doch darum, seine oder ihre Adresse einzutragen. Dann steckt ihr den Pass am besten in eure Geldtasche oder in euren Rucksack. So habt ihr die wichtigsten Informationen immer dabei.

Persönliche Angaben

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefonnummer

Geburtsdatum

Katheterangaben

Katheterbezeichnung

Kathetergröße (in CH angegeben)

Katheterlänge (in cm angegeben)

Artikel-Nummer



Hilfreiche Adressen

Österreich

Spina Bifida & Hydrocephalus Österreich

Goldlackgasse 10

1220 Wien

Tel. 0676 3535468

sbhoub@gmail.com

MMC Oberösterreich

Volkersdorf 27 / 4470 Enns

Tel. 0664 734 89 292

a.hintringer@aon.at

SB & HÖ Steiermark

Triesterstr. 211 / 8073 Feldkirchen

Tel. 0664 1015205

hompre@a1.net

SBHÖ ArGe Tirol – Dachverband der Tiroler Selbsthilfevereine & -gruppen im Gesundheitsbereich

Innrain 43 / 6020 Innsbruck

Tel. 0512 577198

steyer.gb@aon.at

www.spinabifida-tirol.at.tf

Salzburger Spina Bifida & Hydrocephalus – Selbsthilfegruppe für Betroffene und Angehörige e. V.
Griesweg 5 / 5400 Rif/Hallein
Tel. 06245 78716 / 0664 573 8107
spinabifida.sbg@aon.at

Weitere Links

Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation –

www.oea.or.at

Bizeps – www.bizeps.or.at

Rolliwegweiser –

www.rolli-wegweiser.at

Bundessozialamt –

www.bundessozialamt.gv.at

Verband d. Querschnittgelähmten –

www.vqo.at

Allge. Unfallversicherungsanstalt –

www.auva.at

Pensionsversicherungsanstalt –

www.pensionsversicherung.at

www.sozialinfo.at

Deutschland

ASbH – Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydrocephalus e. V.

Grafenhof 5 / 44137 Dortmund

Tel. +49 231 861050-0

asbh@asbh.de / www.asbh.de

SoMA e. V. – Selbsthilfeorganisation für Menschen mit anorektalen Fehlbildungen

Weidmannstraße 51

80997 München

Tel. +49 89 14904262

info@soma-ev.de

www.soma-ev.de

rehaKIND e. V.

Saturnstraße 31 / 44388 Dortmund

Tel. +49 231 6103056

info@rehaKIND.com

www.rehakind.com

Schweiz

SB+H


Geschäftsstelle SBH Schulrain 3

6276 Hohenrain

Tel. +41 41 9100015

geschaefsstelle@spina-hydro.ch

www.spina-hydro.ch

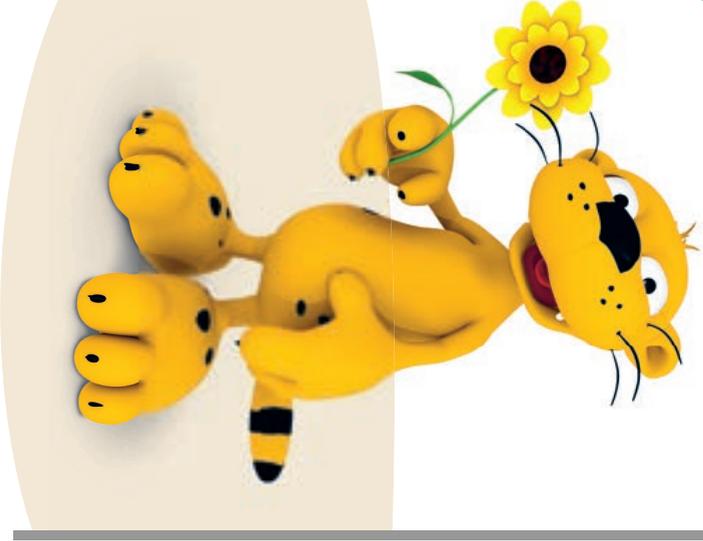

van jaguar

Porto zahlt
Empfänger

Antwort
Coloplast GmbH
Thomas-Klestil-Platz 10
1030 Wien



Und das ist für Ihr Kind!

Bestellen Sie das persönliche Coloplast-Paket für Ihr Kind





Personenangaben

Herr* Frau*

Name, Vorname*

Straße, Nr.*

PLZ, Ort*

Telefon (für evtl. Rückfragen)*

E-Mail _____ @ _____

Name des Kindes _____ / _____ / _____

Geburtsdatum des Kindes _____

Um welche Erkrankung handelt es sich bei Ihrem Kind?

Krankheitsbild _____ seit _____

Welche der folgenden Produkte verwendet Ihr Kind heute?

Hersteller	Stk./Woche
<input type="checkbox"/> Einmalkatheter	
<input type="checkbox"/> Kondom-Urinal	
<input type="checkbox"/> Urinbeutel	



Nur wenn Sie nachstehender Datenschutzerklärung voll zustimmen, ist es Ihnen möglich, Services (Zusendung von Mustern, Informationsmaterial, Produktinformationen, usw.) von Coloplast GmbH Österreich zu erhalten.

»Ich bin auch weiterhin an Informationen zu Coloplast-Produkten und Services interessiert. Ich erteile die ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung meiner zur Verfügung gestellten Daten – einschließlich der Angaben zu meinen gesundheitlichen Verhältnissen – zum Zwecke der Zusendung von Broschüren und Produkt-Mustern von Coloplast-Produkten und Services per Post, E-Mail oder Telefon. Ich bin darüber unterrichtet, dass meine Daten ausschließlich von Coloplast Österreich verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden. Mir ist bekannt, dass ich mein Einverständnis jederzeit kostenfrei und problemlos bei der Coloplast GmbH, Thomas-Klestil-Platz 10, 1030 Wien oder E-Mail at@coloplast.com, widerrufen kann«. Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert.

* erforderliche Angaben

Ort, Datum*

Unterschrift*

(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)



Musterbestellung

Einmalkatheter für Kinder und Jugendliche (Mädchen ♀ / Jungen ♂)

SpeediCath®

CH 06 CH 08 CH 10 CH 12
 20 cm (♀) 30 cm (♂)

SpeediCath® Compact Serie speziell für Mädchen

SpeediCath® Compact

CH 06 CH 08 CH 10 CH 12

EasiCath® Set für Kinder

CH 08 20 cm
 CH 10 40 cm
 CH 12



Katherisierungszubehör

Coloplast Katheterhalter
Service für Anwenderinnen des SpeediCath Compacts
 Katherisierungsspiegel
 Hosenhalter

Kondom-Urinale für Jungen

Conveen® Optima (Schaftlänge 5 cm)

Durchmesser 21 mm 25 mm Conveen® Optima Messschablone



Services



Alltagshilfen

Coloplast HilfsmittelPass
 Anleitungsfilm Katheterisieren (DVD)



KinderWelt

Coloplast MiniAnleitung zum Katheterisieren
 für Mädchen für Jungen
 Ratgeber für Kinder zum Katheterisieren
 Jan Jaguar Heidenurkunde
 Informationsbroschüre Peristeen Darmanagement



Beratung


Sollten Sie noch Fragen haben oder Hilfe beim Ausfüllen der Karte benötigen, stehen wir gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach unter **01 707 57 51 54** an. Sie erreichen uns von Mo – Do von 9 – 16 Uhr und Fr von 9 – 12 Uhr.



»Das sieht hier so langweilig aus.
Malst du meine Welt bunter?«



»Verbinde die Nummern
und lass dich überraschen«

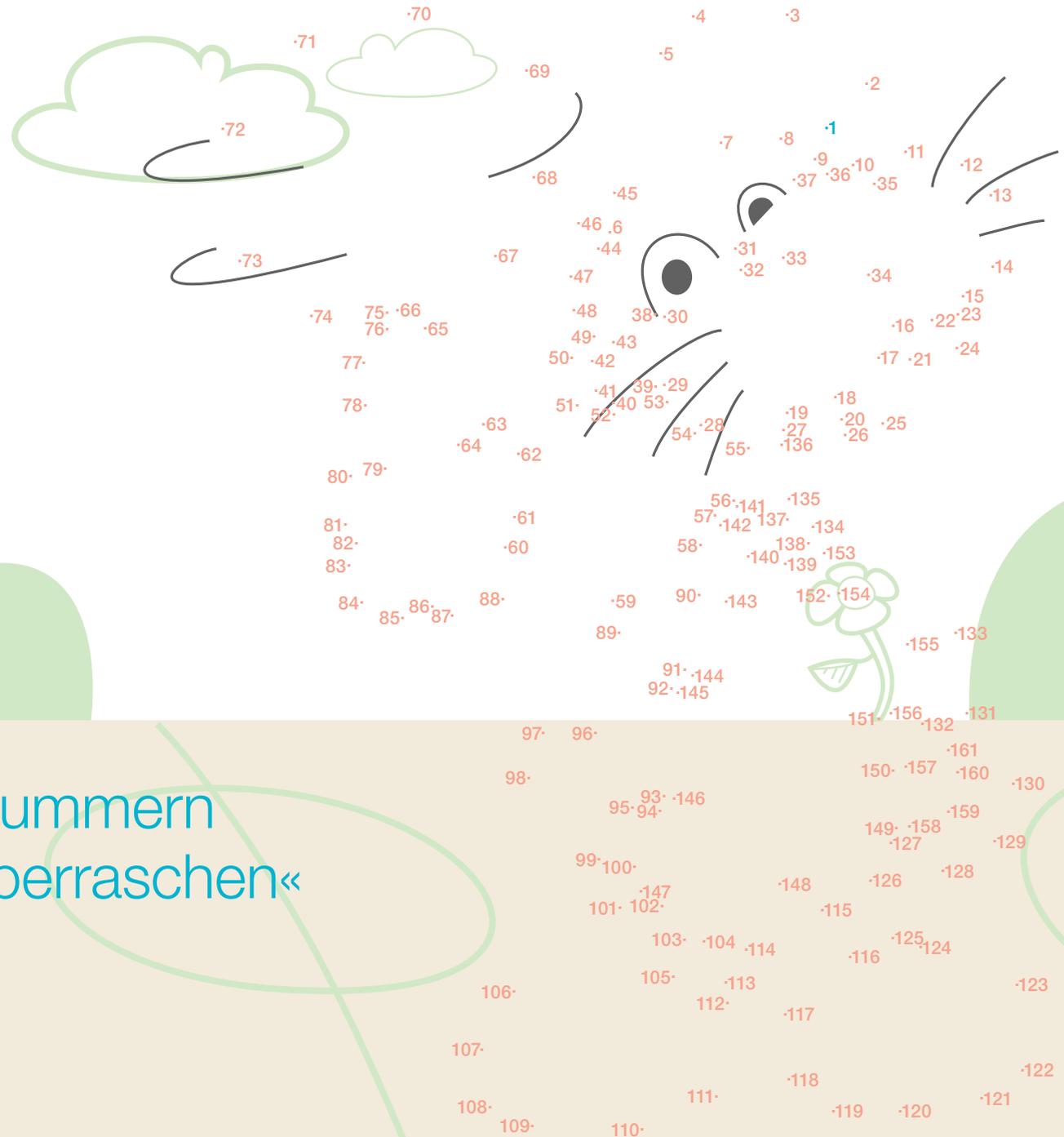

»Das rechte Bild ist anders als das Linke.
Kannst du die 7 Unterschiede finden?«



Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden.

Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und die Urologie. Coloplast ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 8.000 Mitarbeitern.