




1 Alles bereitlegen



2 Hände waschen

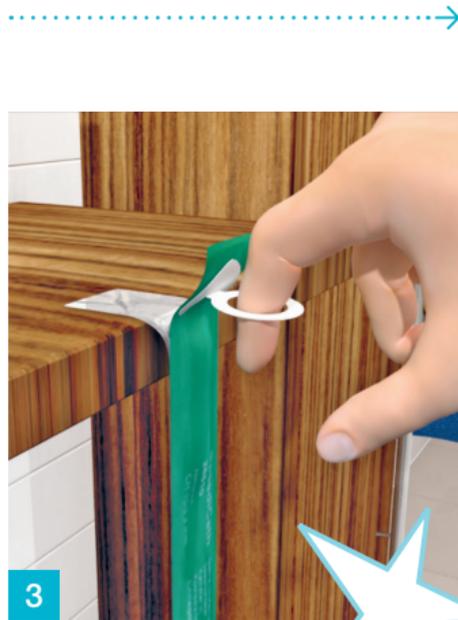

3 Verpackung öffnen



4 Vor die Toilette stellen



5 Hände desinfizieren



6 Penis desinfizieren

bitte wenden

SpeediCath®

Möchtest du noch mehr über das Katheterisieren wissen? Dann frag einfach mich! Ob per E-Mail, Brief oder am Telefon – ich freue mich immer, wenn du oder deine Eltern sich bei mir melden.

Hier meine E-Mail

beratungsservice.at@coloplast.com

und meine Postadresse


Coloplast GmbH
Thomas-Klestil-Platz 10 | 1030 Wien

www.coloplast.at


Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach unter 01707 57 51 54 an. Sie erreichen uns von Mo–Do von 9–16 Uhr und Fr von 9–12 Uhr.

210N IP 174 Z


The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2013-10. www.coloplast.at All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

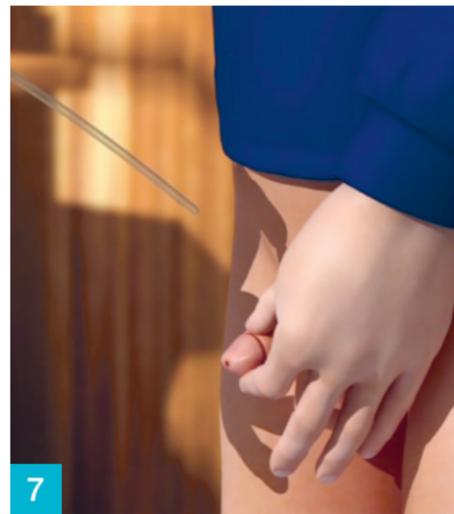

7 Katheter einführen

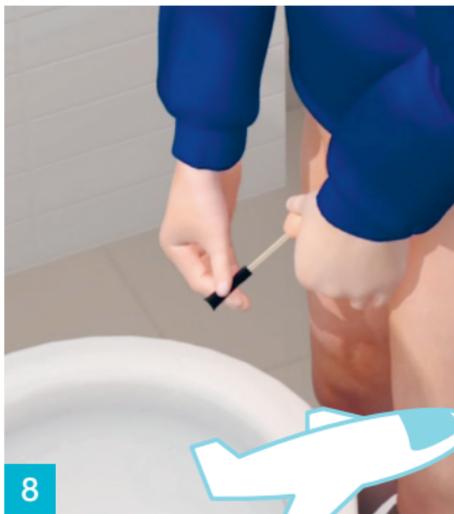

8 Katheter über die Toilette

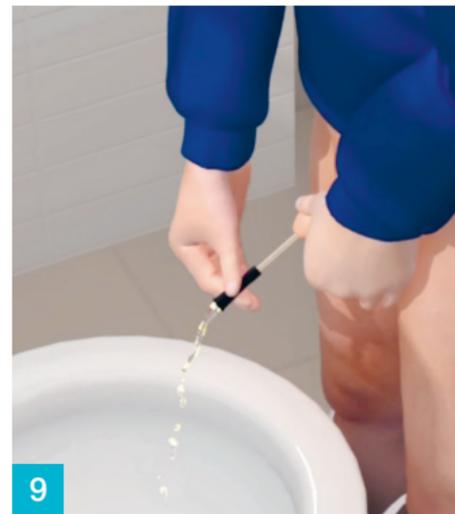

9 Blase entleeren



10 Hände waschen

SpeediCath®

Einfach katheterisieren.

Los geht's mit der Coloplast MiniAnleitung!



JUNGEN
im Stehen