




1 Alles bereitlegen



2 Hände waschen




3 Spiegel befestigen

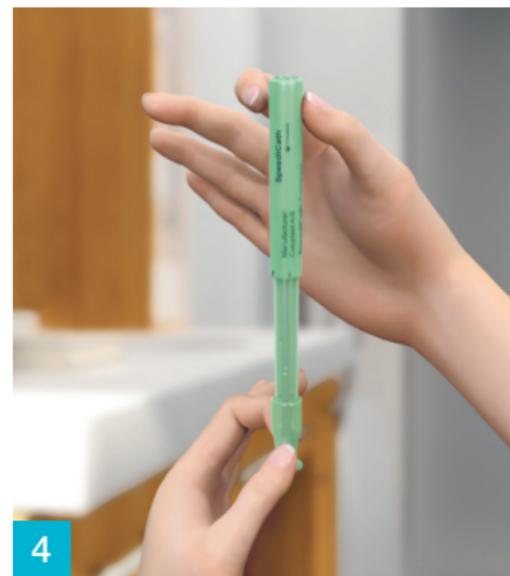

4 Katheter öffnen



5 Katheter herausziehen

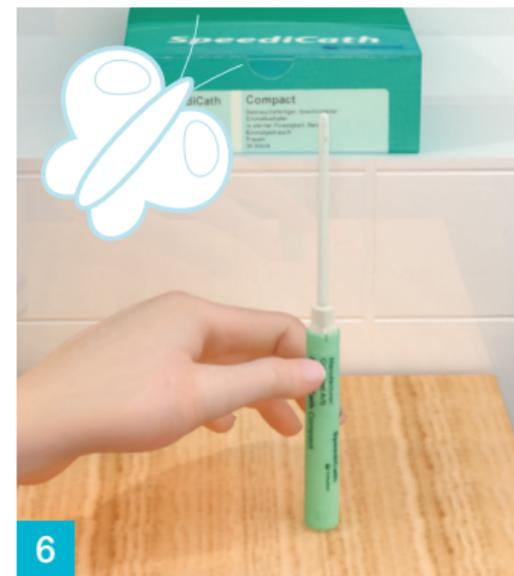

6 Katheter abstellen

bitte wenden

**SpeediCath®**

Möchtest du noch mehr über das Katheterisieren wissen? Dann frag einfach mich! Ob per E-Mail, Brief oder am Telefon – ich freue mich immer, wenn du oder deine Eltern sich bei mir melden.

**Hier meine E-Mail**

[beratungsservice.at@coloplast.com](mailto:beratungsservice.at@coloplast.com)

**und meine Postadresse**


Coloplast GmbH  
Thomas-Klestil-Platz 10 | 1030 Wien

[www.coloplast.at](http://www.coloplast.at)

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach unter 01707 57 51 54 an. Sie erreichen uns von Mo–Do von 9–16 Uhr und Fr von 9–12 Uhr.


210N IP 176 Z

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.  
© 2013-10. [www.coloplast.at](http://www.coloplast.at)  
All rights reserved Coloplast A/S,  
3050 Humlebaek, Denmark.

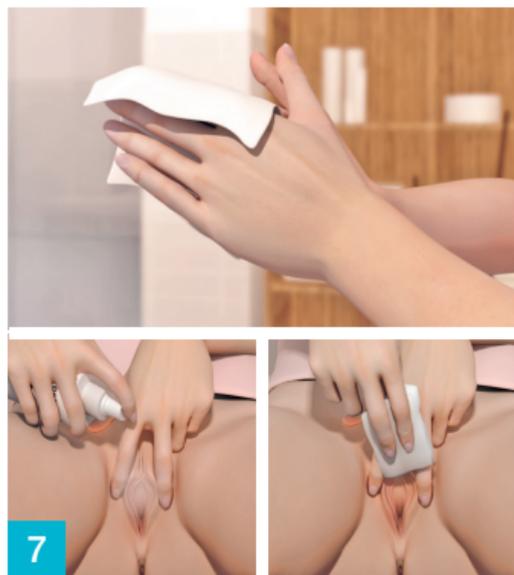


7

Hände und Scheide  
desinfizieren

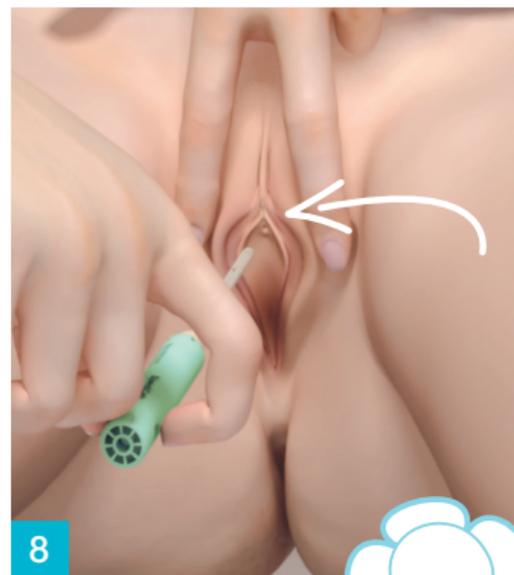

8

Harnröhreneingang

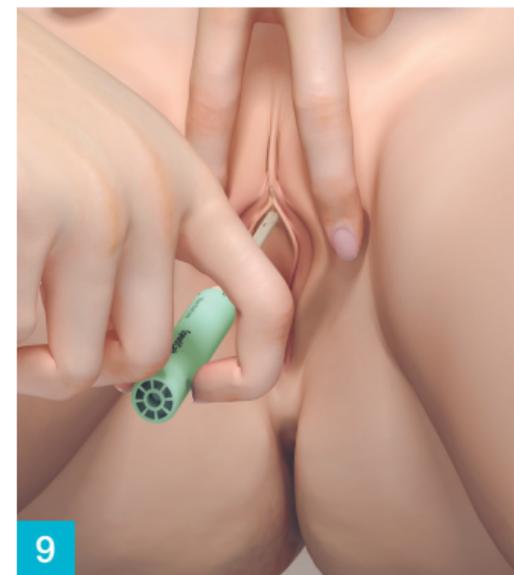

9

Katheter einführen



10

Hände waschen

**SpeediCath®**

Einfach katheterisieren.

Los geht's mit der Coloplast MiniAnleitung!



MÄDCHEN