

# Peristeen®

Mehr Kontrolle und Sicherheit im Darmmanagement.

**Peristeen® Light** kann den Alltag bei Darmfunktionsstörungen erleichtern – ergänzt durch den **Peristeen® Analtampon** für zusätzlichen Schutz.



# Peristeen® Light



## Mehr als 40%

aller Menschen weltweit leiden unter Darmfunktionsstörungen. Sowohl die Fachpersonen als auch die Anwender:innen wünschen sich eine einfache Lösung.<sup>1</sup>

Peristeen® Light ist ein leicht und diskret anzuwendendes Irrigationssystem mit geringer Wassermenge (175 ml bzw. 250 ml) für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren. Es kann chronische Darmbeschwerden wie Verstopfung oder Stuhlinkontinenz lindern und lässt sich mit wenigen einfachen Schritten in den Alltag integrieren.

Dank seiner gleichmäßigen Form lässt sich der Wasserbehälter leicht in der Hand halten und zusammendrücken. Er fasst 175 ml bzw. 250 ml Wasser und kann 30-mal verwendet werden. Optional kann er mit einem Schlauch zur Verlängerung verbunden werden, welcher ebenfalls 30-mal angewendet werden kann.

## Die Produktvorteile

Einmal-Konuskatheter mit zwei seitlichen Wasseröffnungen und einer abgerundeten Spitze für möglichst sanftes Einführen.

Großzügige Katheter-Basis stellt sicher, dass der Wasserbehälter nicht mit Ausscheidungen in Berührung kommt.

Die hydrophile Beschichtung wird nach 2 Sekunden unter Wasser aktiviert.

Der Wasserbehälter liegt durch seine Form gut in der Hand und lässt sich leicht zusammendrücken.

Überstehender Deckel sorgt für ein einfaches Öffnen und Schließen.

Das Einwegventil verhindert einen Rückfluss möglicher Ausscheidungen in den Behälter.

Auch mit Verlängerungsschlauch erhältlich.

NEU

Für die Anwendung von Peristeen® Light benötigen Sie ausschließlich Leitungs- oder stilles Mineralwasser ohne weitere Zusätze. Dadurch sinkt das Risiko von Irritationen der Darmschleimhaut, auch bei einer langfristigen Anwendung.

1 Sperber, A. D. et al. Worldwide Prevalence and Burden of Functional Gastrointestinal Disorders, Results of Rome Foundation Global Study. Gastroenterology. 2021;160:99-114.

## Weitere Vorteile des Peristeen® Light auf einen Blick



**Klein & diskret:** Systeme für die Irrigation mit geringer Spülmenge sind oft recht groß. Das neue Peristeen® Light fasst lediglich 175 ml bzw. 250 ml.

**Jetzt auch als  
250 ml-  
Variante mit  
Verlängerungs-  
schlauch!**



**Einfach & unkompliziert:** Die Verwendung des Peristeen® Light erfordert keine lange Vorbereitung. Zwei einfache Handgriffe – und das Irrigationssystem ist einsatzbereit.

**Für zuhause  
und unterwegs  
geeignet**



**Handlich & flexibel:** Der Wasserbehälter ist so geformt, dass er immer gut in Ihrer Hand liegt und sich leicht zusammendrücken lässt. Wechseln Sie ihn nach 30 Anwendungen aus.

## Kostenübernahme des Peristeen® Light

Das Angebot des Peristeen® Light Produktmusters richtet sich ausschließlich an Anwender:innen, für die die Anwendung eines Systems zur analen Irrigation medizinisch indiziert ist. Für eine Kosten-erstattung bei Ihrer Krankenkasse ist zudem eine Verordnung sowie eine Einschulungsbestätigung erforderlich. Die Erstverordnung muss immer von einem:einer Fachärzt:in (z.B. Chirurgie, Neurologie) ausgestellt werden. Die Folgeverordnungen können von dem:der Hausärzt:in ausgestellt werden.

## Peristeen® Light und Peristeen® Plus: Das starke Duo für die transanale Irrigation (TAI)

Je nach Symptomen und deren Stärke stehen Ihnen ab sofort sowohl ein hoch- als auch ein niedrigvolu-miges Irrigationssystem zur Verfügung. So können Sie noch genauer auf die Bedürfnisse Ihrer Pati-ent:innen eingehen und ihnen individuelle Therapie-optionen bieten.

**Tipp:** Peristeen® Light kann auch als Einstiegspro-dukt zum behutsamen Heranführen an die trans-anale Irrigation bei Patient:innen mit Ängsten und/oder Kindern genutzt werden.



# Peristeen® Analtampon: Ein bewährtes Produkt zur Unterstützung bei Stuhlinkontinenz

Mit Stuhlinkontinenz zu leben kann sehr belastend sein. Glücklicherweise gibt es den Peristeen® Analtampon. Er ist ein kleines und diskretes Hilfsmittel, das Ihnen dabei hilft, ungewollte Zwischenfälle im Alltag zu vermeiden. Er wurde entwickelt, um den unkontrollierten Verlust von festem Stuhl zu verhindern und bietet Frauen und Männern mit Stuhlinkontinenz zusätzliche Sicherheit und Schutz für ein aktives Leben.


Er besteht aus einem weichen Schaumstoff, der von einer wasserlöslichen Schutzfolie umgeben ist. Diese Folie komprimiert den Schaumstoff auf ein sehr geringes Maß, sodass der Analtampon in Kombination mit dem beiliegenden Gleitgel einfach und angenehm einzuführen ist. Die Schutzfolie löst sich nach dem Einführen rückstandslos auf.

Der Peristeen® Analtampon kann bis zu zwölf Stunden getragen werden. Er ist in zwei Größen erhältlich und ist für Erwachsene und für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

## Einsatzgebiete

Der Peristeen® Analtampon ist ein einfaches, sicheres und diskretes Hilfsmittel bei Stuhlinkontinenz mit vielen Vorteilen: z. B. kann er dabei unterstützen, Geruchsentstehung und Hautirritationen zu reduzieren<sup>2</sup>; zudem kann er für Anwender:innen aufsaugender Inkontinenzhilfsmitteln eine Alternative darstellen. Der Peristeen® Analtampon kann Ihnen in Kombination mit transanalen Irrigationssystemen wie Peristeen® Light oder Peristeen® Plus eine optimale Versorgung mit zusätzlichem Schutz bieten – so können Sie Ihr Leben wieder unbeschwert genießen.

## Die Produktmerkmale

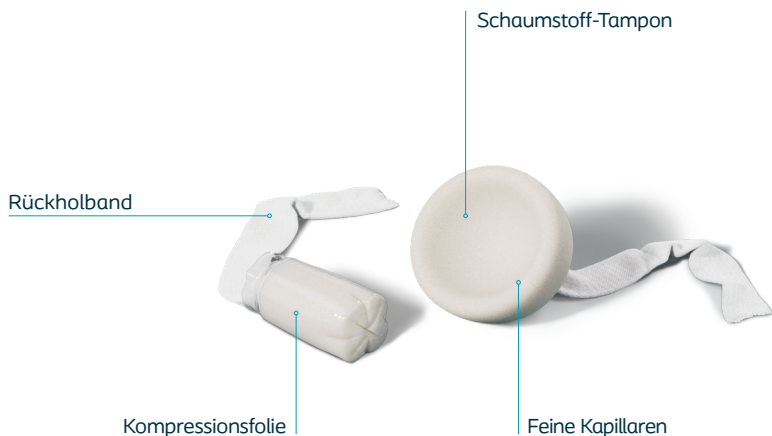


# Studienergebnisse



Um das hohe Qualitätsniveau unserer Produkte zu steigern, werden sie ständig geprüft und getestet. Unser Anspruch ist es, Ihnen mit Hilfsmitteln die Sicherheit zu geben, die Sie für die aktive Teilnahme am Leben benötigen.

Das nachfolgend aufgeführte Studienergebnis<sup>2</sup> zum Peristeen® Analtampon zeigt, wie dessen Anwendung die Kontinenz der Teilnehmer:innen mit neurogen bedingter Stuhlinkontinenz verbesserte. 54 % hatten innerhalb von 18 Anwendungstagen keinen unfreiwilligen Stuhlverlust.

0 Stuhlverluste 54%

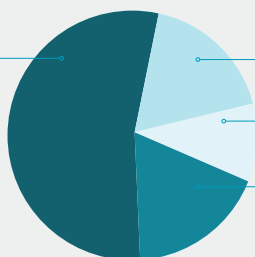

1 Stuhlverlust 18%

2 Stuhlverluste 10%

3 - 5 Stuhlverluste 18%

## Wiedererlangen von Sicherheit & Freiheit

### 80%

der Anwender:innen vermittelte der Peristeen Analtampon das Gefühl von Sicherheit.

### 53%

der Anwender:innen vermittelte der Peristeen Analtampon das Gefühl von Freiheit.

## Zufriedenheit der Anwender:innen

### 87%

der Anwender:innen werden den Peristeen Analtampon weiterverwenden.

### 97%

der Anwender:innen würden den Peristeen Analtampon Dritten weiterempfehlen.

**\*NEU ab Jänner 2026 erhältlich**

Produktbezeichnung	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Pos. Nr	Lfd. Nr.	PZNR
Peristeen® Light Set 175 ml	291710	1 Wasserbehälter 175 ml, 30 Katheter	50781	016	5942511
Peristeen® Light Konuskatheter	291720	15 Konuskatheter	50784	016	5942497
Peristeen® Light Set 250 ml*	291760	1 Wasserbehälter 250 ml, 30 Katheter	50781	019	6014374
Peristeen® Light Set 250 ml mit Verlängerungsschlauch*	291810	1 Wasserbehälter 250 ml, 30 Katheter, 1 Schlauch	50781	018	6014380
Peristeen® Light Schlauch*	291850	1 Verlängerungsschlauch	50785	018	6014397
Peristeen® Analtampon klein*	014500	20 Analtampons + 1 Tube Gel	50762	023	2060472
Peristeen® Analtampon groß*	014510	20 Analtampons + 1 Tube Gel	50762	024	2060489

Sind Sie an Peristeen® Produkten interessiert? Scannen Sie den QR-Code, um sich ein kostenfreies Muster anzufordern:



[de.coloplast.at/peristeen-light](https://de.coloplast.at/peristeen-light)

Sind Sie eine medizinische Fachperson? Erfahren Sie mehr über Peristeen® für Ihre Patient:innen unter:



[de.coloplast.at/peristeenlight-hcp](https://de.coloplast.at/peristeenlight-hcp)



## Mehr Unterstützung

Hotline: 0800 601 092

E-Mail: [beratungsservice.at@coloplast.com](mailto:beratungsservice.at@coloplast.com)

Montag bis Freitag von 9:00 - 15:30 Uhr

## Mehr Tipps und Tricks

Besuchen Sie uns auch auf [www.coloplast.at](https://www.coloplast.at)

PM-36272 / 210NIP368Z

Coloplast GmbH, Thomas-Kleist-Platz 10, 1030 Wien, Österreich, Tel. +43 1 7075751-0, [atbestellung@coloplast.com](mailto:atbestellung@coloplast.com), [www.coloplast.com](https://www.coloplast.com)  
The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2025-11. All rights reserved Coloplast A/S