

Brava® Stomabandage

Anwenderkarte

Lesen Sie vor Anwendung des Produkts
die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.


Vertrieb durch  **Coloplast**




Brava® Stomabandage




1. Anbringen der Bandage

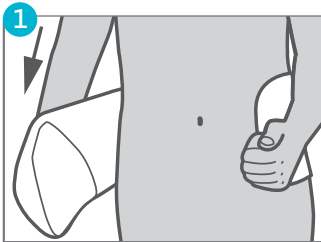


Legen Sie sich auf den Rücken. Stecken Sie eine Hand in den Handschuh und legen Sie die Bandage mit der anderen Hand um sich herum.

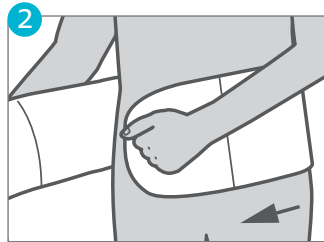


Positionieren Sie die Zuschneidezone über dem Stoma, so dass sie auf der linken oder rechten Seite liegt.

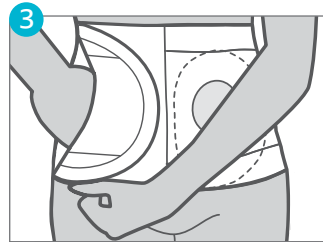


Legen Sie die Hand im Handschuh auf den Klettverschluss, um die Bandage zu schließen. Sie können den Stützgrad mittels Klettverschluss regulieren.

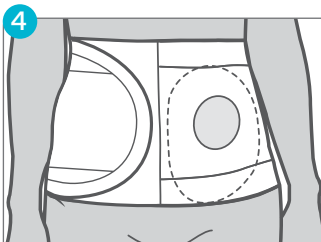

Stellen Sie sicher, dass sich die Zuschneidezone über dem Stoma befindet. Die Bandage sollte nicht zu locker sitzen und keine Falten schlagen.

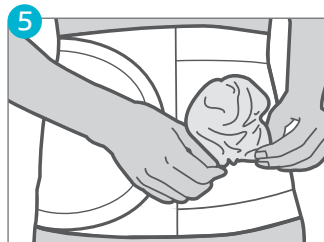


Wenn Sie die Bandage mit einem individuellen Lochausschnitt verwenden, ziehen Sie den Beutel vorsichtig durch die Lochöffnung.

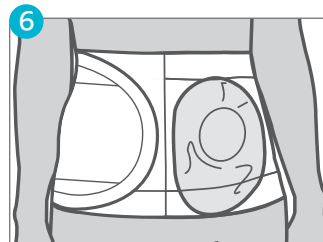


Die Brava Stomabandage sitzt nun korrekt.

2. Zuschneiden des Lochausschnitts

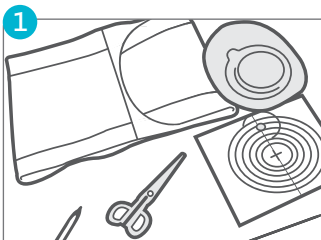


Für die Gestaltung des Lochausschnitts benötigen Sie: Brava Stomabandage, Stomabeutel, Schneideschablone, Schere und Stift.

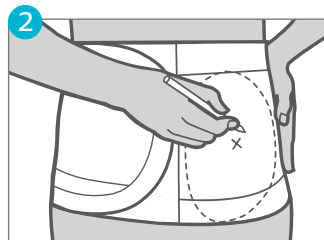


Finden Sie die Mitte des Stomas und markieren Sie diese Stelle auf der Bandage mit einem kleinen X. Das ist die Mitte des Lochausschnitts.




Entfernen Sie die Schutzfolie. Legen Sie diese mit der haftenden Seite lose auf den Stomabeutel. Das X muss sich in der Mitte des Starterlochs der Stomaplatte befinden.

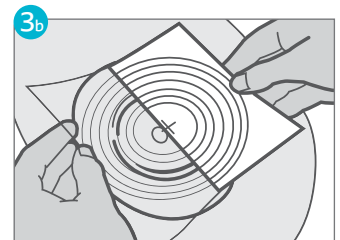


Zeichnen Sie auf die Schneideschablone einen Kreis entsprechend dem Umfang der Koppelung (wenn 2-teilige Versorgung) ...

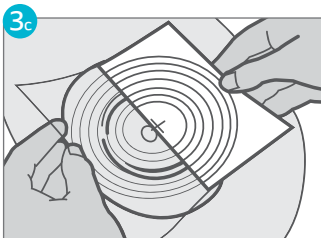


... oder entsprechend dem Umfang der Verschweißung zwischen Beutel und Stomaplatte (wenn 1-teilige Versorgung).

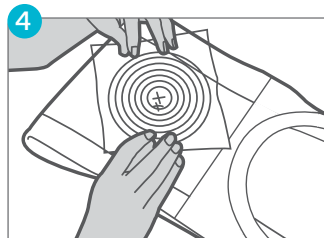

Legen Sie die Schneideschablone so auf die Bandage, dass das X auf der Schneideschablone und das X auf der Bandage übereinanderliegen.

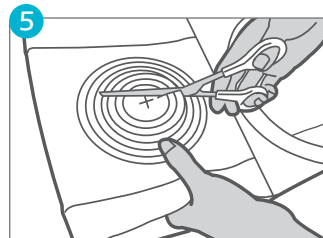

Nahe der Mitte ein Loch schneiden und mit 0,5-1 cm Abstand innerhalb der Linie entlang schneiden, da sich der Ausschnitt noch dehnt.

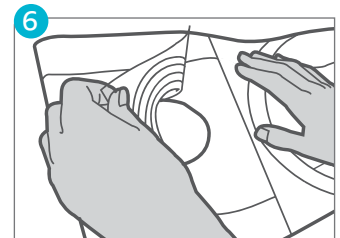

Entfernen Sie die Schneideschablone. Die Brava Stomabandage mit individuellem Lochausschnitt ist nun einsatzbereit.