



Coloplast





Coloplast






Coloplast





Coloplast

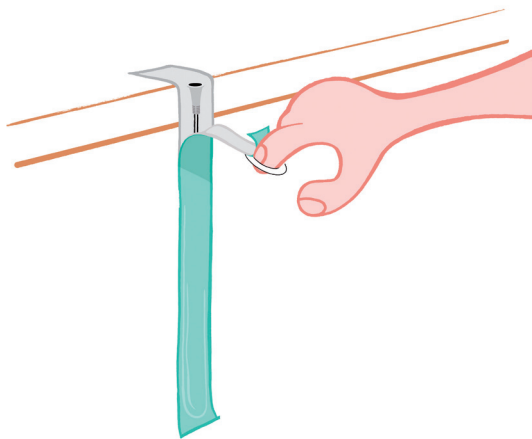




Coloplast






Coloplast

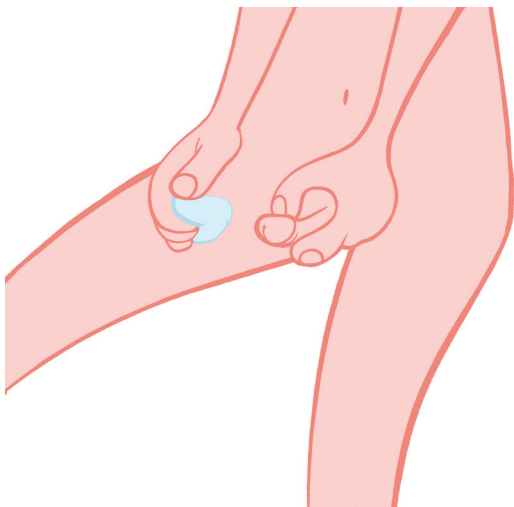




Coloplast

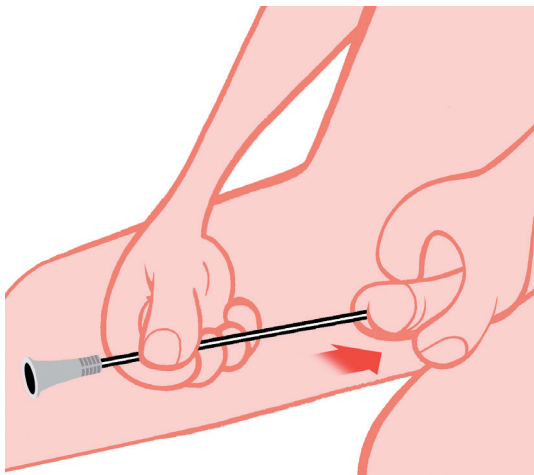



Coloplast

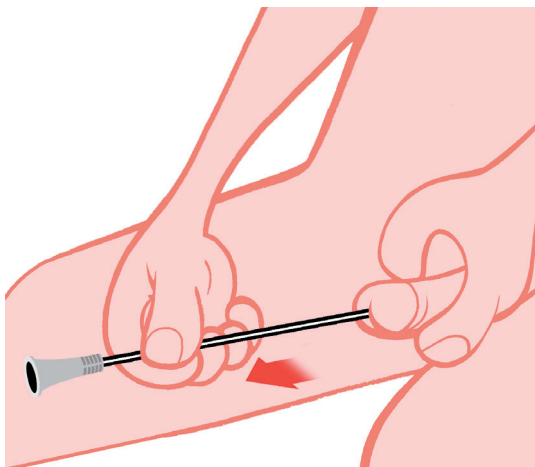



Coloplast





Coloplast



„Es ist einfacher, wenn alles
was man braucht, vor dem
Pipimachen bereitliegt.“



„Vor dem Pipimachen ist es wichtig, dass die Hände sauber sind, damit keine Bakterien in die Harnblase kommen können.“





„Befestige die Verpackung an einer Stelle die du einfach erreichen kannst. Öffne die Verpackung indem du an der Aufreißlasche ziehst.“



„Stelle dich bequem neben die Toilette. Das macht das Pipimachen einfacher.“



„Das Waschen deines Penis
vor dem Pipimachen hält
Bakterien fern.“





„Führe den Katheter langsam und behutsam in das Loch deiner Penisspitze, bis das Pipi zu fließen beginnt. Dann schiebe ihn noch ein kleines bisschen mehr hinein.“





„Ziehe den Katheter langsam heraus. Stoppe kurz, wenn mehr Urin herauskommt.“





„Es ist wichtig die Verbreitung von Keimen nach dem Pipi-machen zu verhindern.“





„Gut gemacht – du
hast ganz alleine Pipi
gemacht!“



„Warum ist es wichtig
zu Beginn alles
bereitzulegen?“



„Warum solltest du dir
vor dem Pipimachen die
Hände waschen?“





„Was solltest du mit dem Katheter machen, bevor du mit dem Pipimachen beginnst?“





„Wo solltest du stehen,
wenn du dich für das Pipi-
machen bereit machst?“





„Warum solltest du deinen
Penis vor dem Pipimachen
waschen?“





„Was musst du machen,
damit das Pipi
herauskommt?“



„Wie schnell kannst du den
Katheter herausziehen?“



„Warum solltest du dir
nach dem Pipimachen die
Hände waschen?“



„Warum kannst du stolz auf dich sein?“

