



Coloplast





Coloplast





Coloplast






Coloplast






Coloplast

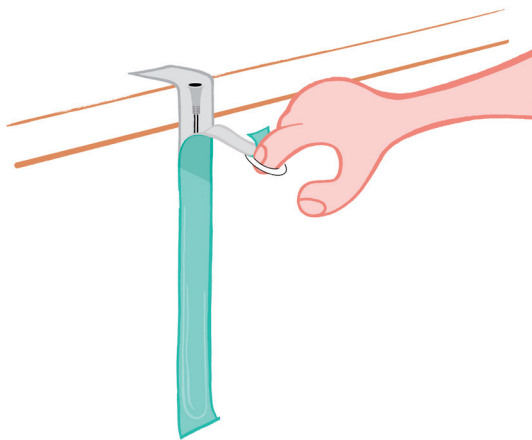



Coloplast

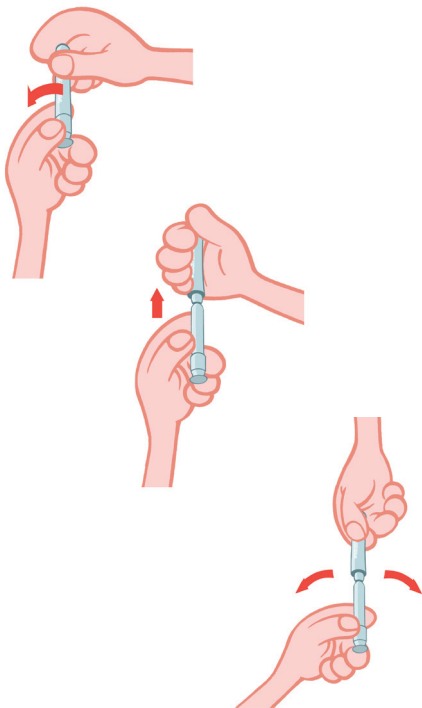





Coloplast






Coloplast

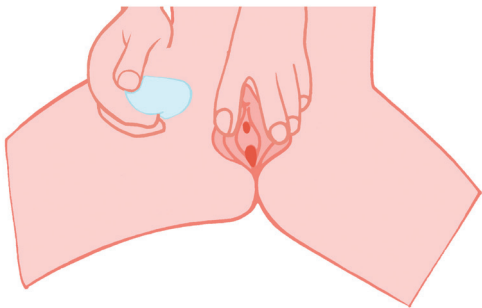

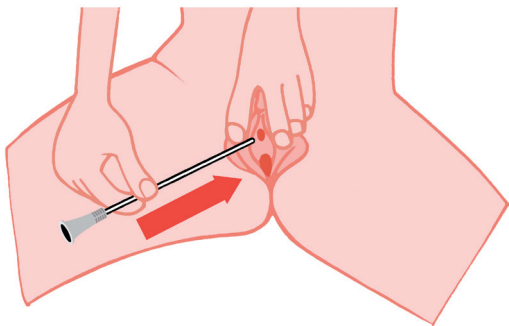





Coloplast

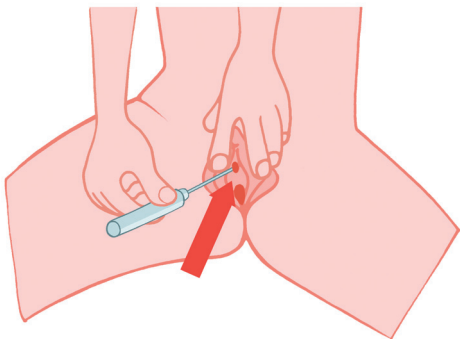



Coloplast

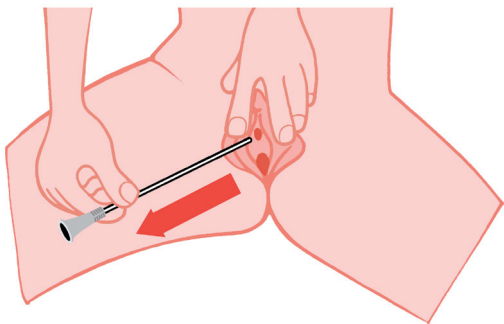

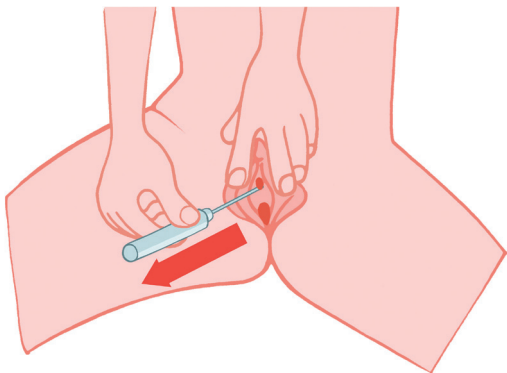



Coloplast





Coloplast



„Es ist einfacher, wenn alles was man braucht, vor dem Pipimachen bereitliegt.“



„Vor dem Pipimachen ist es wichtig, dass die Hände sauber sind, damit keine Bakterien in die Harnblase kommen können.“





„Öffne die Verpackung und
lege sie an eine Stelle die du
gut erreichen kannst.“




„Halte den Katheter aufrecht, so-
dass der Griff nach unten zeigt.

Drehe die beiden ineinandergesteck-
ten Röhrchen vorsichtig in die
entgegengesetzte Richtung um die
Versiegelung aufzubrechen.

Ziehe die beiden Röhrchen ausein-
ander bis sie in der vollständig
ausgefahrenen Position einrasten.

Um den Katheter frei-
zulegen, halte das
äußere Röhrchen fest
und entferne das
innere Röhrchen,
indem du es
vorsichtig drehst
und abziehst.“

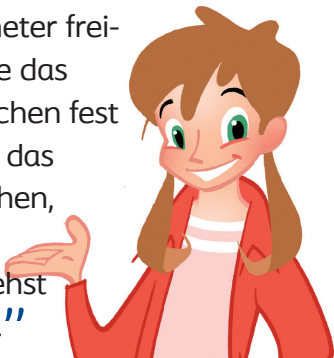

„Setze dich bequem auf die Toilette. Das macht das Pipimachen einfacher.“





„Wasche deine Scheide vor dem Pipimachen. Es ist wichtig, dass du die Schiede von vorne nach hinten wäschst. Du kannst einen Spiegel an deinem Oberschenkel als Unterstützung verwenden.“





„Führe den Katheter langsam und behutsam in das Pipiloch ein, bis das Pipi zu fließen beginnt. Dann schiebe ihn noch ein kleines bisschen mehr hinein.“



„Ziehe den Katheter langsam heraus. Stoppe kurz, wenn mehr Urin herauskommt.“



„Es ist wichtig die Verbreitung von Keimen nach dem Pipi-machen zu verhindern.“





„Gut gemacht – du
hast ganz alleine Pipi
gemacht!“



„Warum ist es wichtig
zu Beginn alles
bereitzulegen?“



„Warum solltest du dir
vor dem Pipimachen die
Hände waschen?“





„Was solltest du mit dem Katheter machen, bevor du mit dem Pipimachen beginnst?“



„Wo solltest du sitzen, wenn du dich für das Pipimachen bereit machst?“



„Warum solltest du deine
Scheide vor dem Pipi-
machen waschen?“



„Was musst du
machen, damit das
Pipi herauskommt?“



„Wie schnell kannst du den
Katheter herausziehen?“



„Warum solltest du dir
nach dem Pipimachen die
Hände waschen?“



„Warum kannst du stolz auf dich sein?“

