

InterDry[®] – die effektive Lösung zur Versorgung von Hautfalten

 Coloplast

InterDry[®]



Intertrigo – eine häufige Komplikation in Hautfalten

Intertrigo ist eine feuchtigkeitsbedingte Hautschädigung, die häufig in Hautfalten wie z. B. Achselhöhlen oder in Bauchfalten vorkommt. Sie entsteht durch länger anhaltenden Kontakt mit Schweiß sowie der Reibung von Haut-auf-Haut.

Symptome

- › Erythem
- › Jucken
- › Brennen
- › Mazeration
- › Geruch



1. Bauchfalte
2. Unter der Brust
3. Kniefalte
4. Achselhöhle

Gefährdete Körperregionen

Nacken _____

Achselhöhle _____

Unter der Brust _____

Rücken _____

Bauchfalte _____


Zwischen den Fingern _____

Leiste _____

Oberschenkel _____

Untere Extremitäten _____

Zwischen den Zehen _____

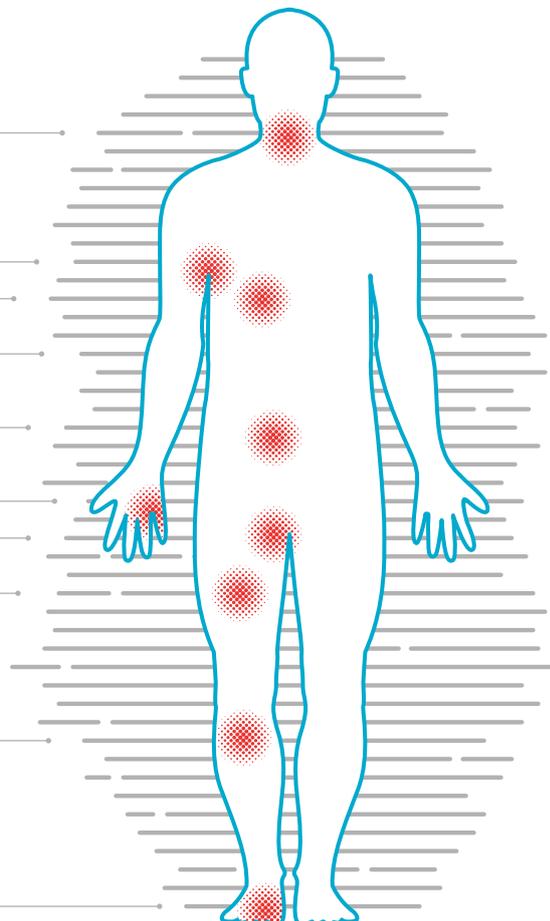

Intertrigo – eine Beeinträchtigung der Lebensqualität

Die Symptome von Intertrigo können die Lebensqualität der Patienten stark beeinträchtigen. Zudem ist die geschädigte Haut besonders empfindlich gegenüber Bakterien und Pilzen. Unbehandelt kann Intertrigo zu einer sekundären Infektion führen.

Risikofaktoren

- › Fettleibigkeit
- › Diabetes mellitus
- › Immobilität
- › Hyperhidrose
- › Herabhängende Brüste
- › Schlechte Hygiene


Heiße und feuchte Bedingungen verstärken die Risikofaktoren.



Hautfaltenschäden werden vor allem durch 3 Schlüsselfaktoren ausgelöst

Als Standardbehandlung einer Intertrigo kommen in der Regel Schutzcremes, topische Antimykotika und absorbierende Materialien zum Einsatz. Diese adressieren jedoch in den meisten Fällen nur einen oder zwei der Faktoren, die mit Intertrigo verbunden sind.

Die Standardbehandlungen berücksichtigen **nicht alle 3 Faktoren**, die mit dem Management von Hautfalten verbunden sind.

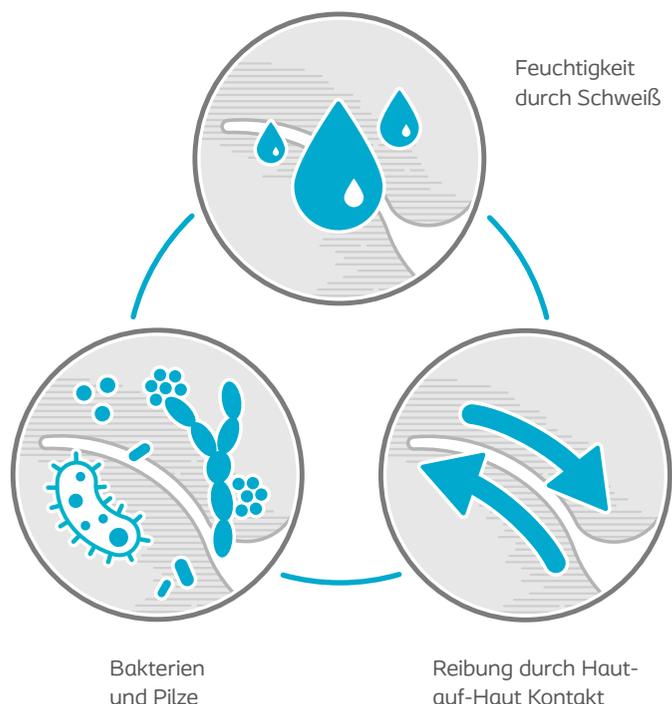




Transportiert Feuchtigkeit aus der Hautfalte heraus, wo sie verdunsten kann.



Minimiert die Reibung von Haut-auf-Haut

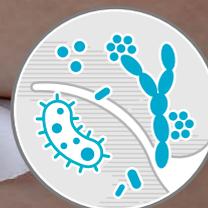

Bekämpft Pilze und Bakterien mit einem antimikrobiellen Silberkomplex

InterDry® – die 3-in-1 Lösung für ein erfolgreiches Hautfaltenmanagement

InterDry® ist ein weicher, feuchtigkeitstransportierender Textilstoff mit einem antimikrobiellen Silberkomplex, der auf alle 3 Risikofaktoren abzielt, die mit der Schädigung der Hautfalte verbunden sind.

- › InterDry® reduziert klinisch nachgewiesene Symptome der Intertrigo (Erythem, Juckreiz/Brennen, Mazeration, Denudierung und Satellitenläsionen sowie Gerüche) innerhalb von 5 Tagen.³
- › InterDry® wird sowohl von Patienten als auch von Fachkräften positiv beurteilt, da es die Versorgung von Hautfalten erheblich vereinfacht.
- › Die schnelle Reduzierung der Symptome steigert die Lebensqualität der Patienten und senkt gleichzeitig die Kosten der Behandlung.

Scannen Sie den QR-Code
InterDry® Film und weitere
Produktinformationen



InterDry® – reduziert die Symptome innerhalb von 5 Tagen³

Fallbericht 1

Erstbehandlung

Symptome

Erythem, Denudierung, Mazeration

Behandlung

Orale und topische Antimykotika-Behandlung für **231 Tage**

Ergebnis

Komplikation **nicht** gelöst

Folgebehandlung

Anwendung von InterDry®, vollständige Abheilung nach **5 Tagen**

Kniefalte



Tag 1



Tag 5

Fallbericht 2

Erstbehandlung

Symptome

Erythem, Schmerzen, Juckreiz, Geruch

Behandlung

Topische Cremes für einen unbestimmten Zeitraum

Ergebnis

Komplikation **nicht** gelöst

Folgebehandlung

Anwendung von InterDry®, fast vollständige Abheilung nach **7 Tagen**

Unter der Brust



Tag 1



Tag 7

Referenzen:

1. A Practical Approach to the Prevention and Management of Intertrigo, or Moisture-associated Skin Damage, due to Perspiration: Expert Consensus on Best Practice. Wound Care Canada, Volume 11, Number 2, Fall 2013 Accessible at www.woundcarecanada.ca/supplements.
2. Janniger C.K., Schwartz R.A., Szepietowski J.C., Reich A.: Intertrigo and common secondary skin infections. Am Fam Physician 2005, 72(5): 833–838.
3. Kennedy-Evans K.L., Viggiano B., Henn T., Smith D. Multi-site feasibility study using a new textile with silver for management of skin conditions located in skin folds. Poster presented at: 20th Annual Symposium on Advanced Wound Care; April 28 – May 1, 2007; Tampa, FL and 39th WOCN® Society Annual Conference; June 9–13, 2007; Salt Lake City, UT.

InterDry® Sortiment

InterDry®



Artikel-Nr.	Größe/ cm	St./VE	PZN
67918	25 x 366 Rolle	1	5339625

