


Leitfaden zum geeigneten Einsatz von Wundfüllern

Oberflächlich

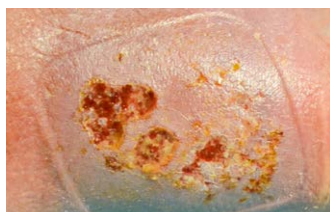

Biatain® Silicone

Biatain® absorbiert vertikal und schützt somit den Wundrand und die -umgebung.



0 – 2 cm tief^{1,2,3}



Biatain® Silicone

Biatain® stellt einen direkten Kontakt zum Wundgrund her und reduziert die Ansammlung von Wundexsudat.



> 2 cm tief




Biatain® Silicone + Wundfüller

Drapieren Sie den Wundfüller locker, aber füllen Sie die Wunde nicht bis auf Hautniveau. Lassen Sie dem darüber applizierten Biatain® Schaum genug Platz, um sich in die Wunde zu wölben. Das ermöglicht eine vertikale Absorption und den Schutz von Wundrand und -umgebung.





Unterminierung/
Tunnel

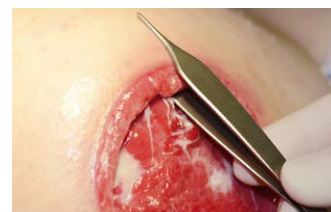

Biatain® Silicone + Wundfüller

Füllen Sie den unterminierten Wundrand und decken Sie die Wunde mit einem Biatain® Schaumverband als Sekundärverband ab.

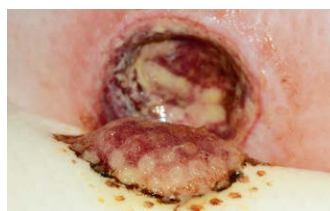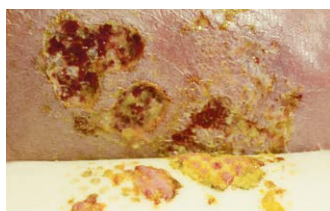

Diese Informationen sind als allgemeine Hinweise zu verstehen.
Bitte berücksichtigen Sie auch die für Ihr Fachgebiet geltenden Leitlinien.

1. Braunwart H et al, Conformability of a foam dressing – clinical experience based on 104 cases. Wound UK 2017. 2. Braunwart H et al, Conformability of a foam dressing – clinical experience based on 104 cases. EWMA 2018. 3. Data on file VV0201548 (Biatain® Silicone 12.5 x 12.5 cm).

Die Biatain® Familie

Biatain® Silicone, mit Silikonhafrand



Artikel-Nr.	Schaumkissen/cm	Größe/cm	St./VE	PZN
3434		7,5 × 7,5 4,5 × 4,5	10	3813407
3435		10 × 10 6,5 × 6,5	10	3813666
3400		10 × 20 5,5 × 15,5	5	4494921
3401		10 × 30 5,5 × 25,5	5	4494938
3408	Multishape	14 × 19,5 7,5 × 12,1	5	4494973
3436		12,5 × 12,5 8,5 × 8,5	10	4249535
3437		15 × 15 10,5 × 10,5	5	3813672
3438		17,5 × 17,5 13 × 13	5	4249541
3404	Sakrum	15 × 19 10,9 × 14	5	4494944
3405	Sakrum	25 × 25 17 × 17,2	5	4494950
3406	Ferse	18 × 18 14 × 13,2	5	4494967

Biatain® Silicone Ag, mit Silikonhafrand



Artikel-Nr.	Schaumkissen/cm	Größe/cm	St./VE	PZN
9636		7,5 × 7,5 4,5 × 4,5	5	4309421
9637		10 × 10 6,5 × 6,5	5	4309438
9638		12,5 × 12,5 8,5 × 8,5	5	4309444
9639		15 × 15 10,5 × 10,5	5	4309450
9640		17,5 × 17,5 13 × 13	5	4309467

Biatain® Alginate



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
0705	5 × 5	10	4050911
0710	10 × 10	10	4050928
0715	15 × 15	10	4050934
0740	3 × 44	5	4050986

Biatain® Silicone Non-Border, mit Silikonhaftung



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
9020	5 × 7,5	10	5290497
9021	7,5 × 7,5	10	5290505
9022	10 × 10	10	5290511
9023	12,5 × 12,5	10	5290528
9024	10 × 20	5	5290534
9025	15 × 15	5	5290540
9026	20 × 20	5	5290557

Biatain® Alginate Ag



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
3755	5 × 5	10	4050940
3760	10 × 10	10	4050957
3765	15 × 15	10	4050963
3780	3 × 44	10	4050992

Biatain® Silicone Lite, mit Silikonhafrand



Artikel-Nr.	Schaumkissen/cm	Größe/cm	St./VE	PZN
3452		5 × 5 2,2 × 2,2	5	4371526
3453		5 × 12,5 2,2 × 9,7	5	4371532
3444		7,5 × 7,5 4,5 × 4,5	10	3954266
3445		10 × 10 6,5 × 6,5	10	3954272
3446		12,5 × 12,5 8,5 × 8,5	10	3954289