


Vermeidung von Druckstellen unter Schutzkleidung




Anleitung zum Zuschneiden von Comfeel® Plus Transparent

1.

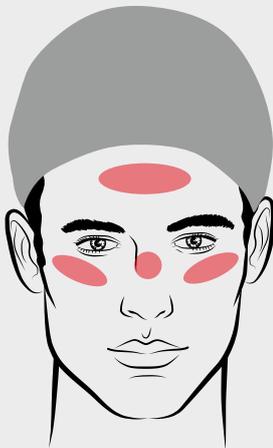


Typische Bereiche, in denen Hautreizungen und Druckstellen durch Schutzbrillen und -masken auftreten können: **Wangen, Nase, Stirn**

2.

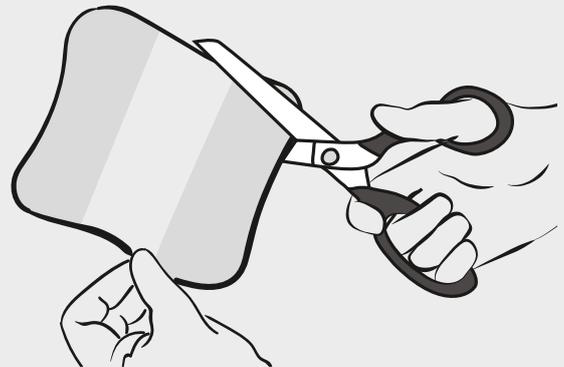

Schneiden Sie den Verband für die betroffenen Hautpartien zu. Entfernen Sie dazu zunächst noch nicht die Schutzfolien.

3.

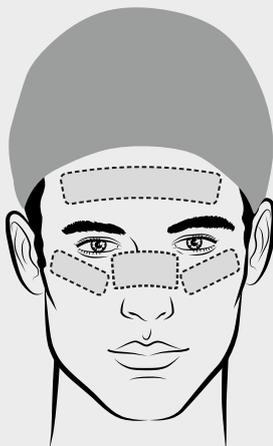

Applizieren Sie den Verband mit der haftenden Seite auf die Haut. Streichen Sie dann vorsichtig über das Produkt, um die Haftung auf der Haut zu optimieren.

4.



Setzen Sie anschließend Ihre Schutzbrillen und Schutzmasken auf.

Die Haut sollte vollständig trocken sein, bevor Sie Comfeel® Plus Transparent applizieren.

Bestellinformation

Comfeel® Plus Transparent



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
3530	5 × 7	10	1442958
3533	10 × 10	10	2835720
3548	5 × 25	5	1721380
3536	9 × 14	10	1442964
3539	15 × 15	5	2835737
3542	15 × 20	5	1442970
3547	5 × 15	5	2060199
3537	9 × 25	5	2835714